


## PBK Hand Universal

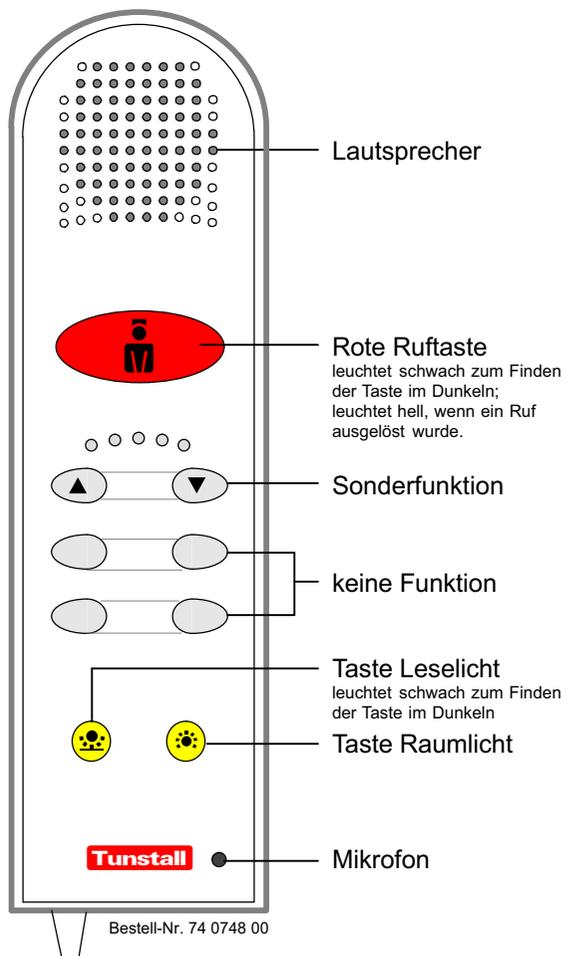

## Rufen




Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie die rote Ruftaste.

Pflegepersonal kommt zu Ihnen oder spricht über Lautsprecher. Über das Mikrofon können Sie antworten.


## Sonderfunktionen

Die Taste mit dem Pfeil nach oben und die Taste mit dem Pfeil nach unten können in jedem Krankenhaus anders benutzt werden, z.B. zur Jalousiesteuerung. Fragen Sie das Pflegepersonal nach der Funktion.

### Funktion abwärts

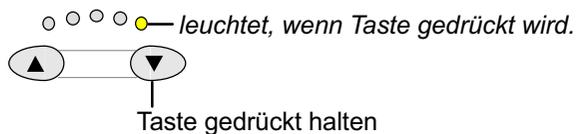

### Funktion aufwärts

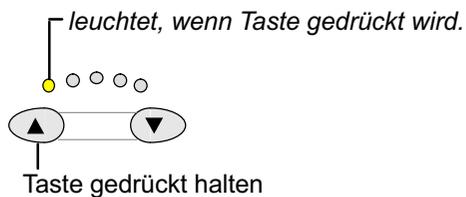

## Licht ein-/ausschalten

Zum Ein- oder Ausschalten Taste kurz drücken.



Leselicht



Raumlicht

## Licht dimmen

Wenn das Licht dimmbar ist, können Sie das Licht durch langes Drücken der Lichttaste dimmen.

Zum Dimmen Taste lang drücken.



Leselicht



Raumlicht


### Funktion des Dimmers

Mit jedem neuen Tastendruck wechselt das Licht zwischen Aufwärts- und Abwärts-Dimmen.

### Licht gedimmt einschalten

Wenn Sie das Licht mit einem kurzen Tastendruck einschalten, wird es mit maximaler Helligkeit eingeschaltet. Sie können das Licht wahlweise mit minimaler Helligkeit einschalten und aufwärts dimmen. Hierzu die Taste so lang drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

**Ruftaster**

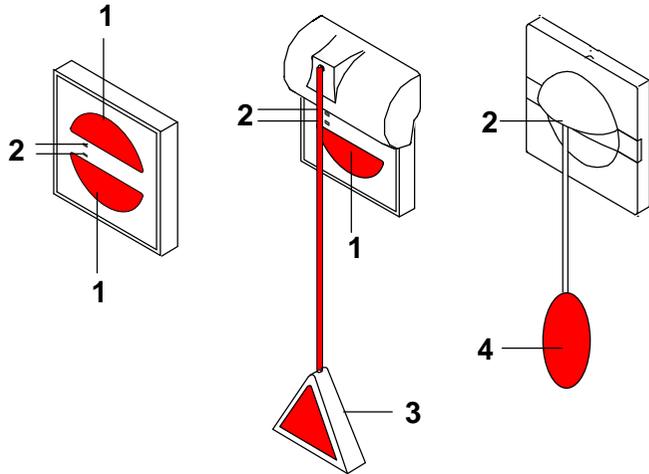


- 1 Ruftaste (rot)**  
zur Rufauslösung
- 2 Findelicht/Beruhigungslicht (rot)**  
Leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln.  
Leuchtet hell, wenn ein Ruf ausgelöst wurde.
- 3 Rufgriff (rot)**  
zur Rufauslösung
- 4 Rufball (rot)**  
zur Rufauslösung

**Wenn Sie Hilfe benötigen**

Alle roten Tasten der Rufanlage dienen zum Auslösen von Rufen.  
Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie eine rote Ruftaste **1**, ziehen am Rufgriff **3** oder drücken den Rufball **4**.  
Zur Bestätigung der Rufauslösung leuchtet das rote Beruhigungslicht **2** hell auf.  
Das Pflegepersonal meldet sich über Lautsprecher oder kommt zu Ihnen.

**Birntaster**

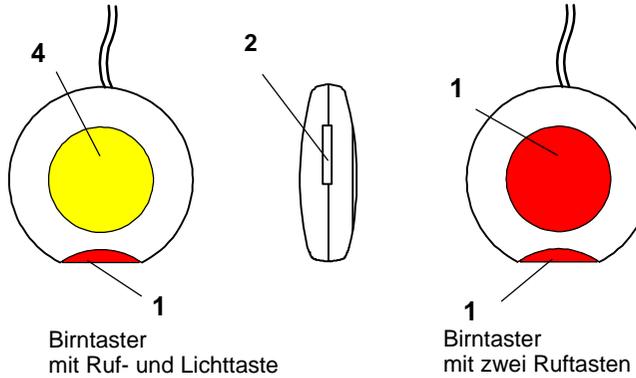


- 1 Ruftaste (rot)**  
zur Rufauslösung
- 2 Findelicht/Beruhigungslicht (rot)**  
Leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln.  
Leuchtet hell, wenn ein Ruf ausgelöst wurde.
- 4 Leselichtschalter (gelb)**  
zum Schalten des Leselichts

**Geräte- und Kabelhalter**



Mithilfe des Geräte- und Kabelhalters lassen sich die Birntaster oder die PBK Hand komfortabel am "Bett-Galgen" befestigen.  
Bei Zugbelastung öffnet sich der Halter und schützt somit das Gerät vor Zerstörung.

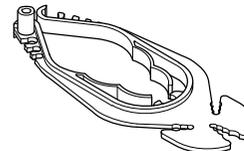

**Rufanlage**  
Zimmer mit PBK Hand Universal

**Gebrauchsanweisung für Patienten**