


Bedienelemente

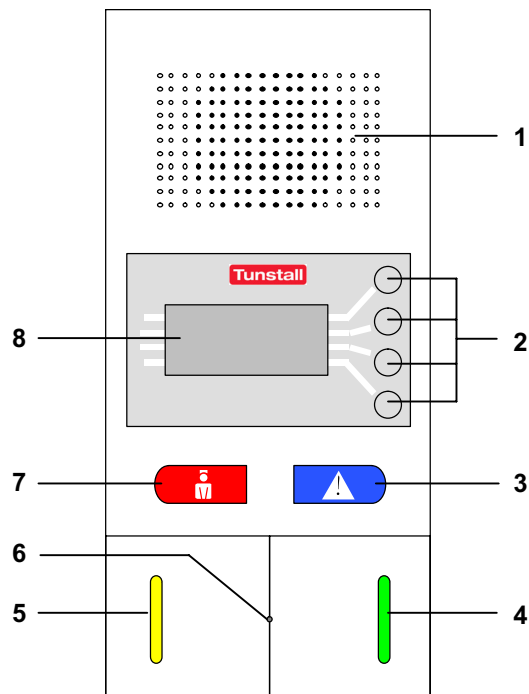

- 1 Lautsprecher
- 2 Vier Funktionstasten
Belegung situationsabhängig
- 3 Blaue Alarmtaste
leuchtet, wenn Alarm ausgelöst wurde
- 4 Grüne Anwesenheitstaste Personal 1
leuchtet, wenn Anwesenheit eingeschaltet ist
- 5 Gelbe Anwesenheitstaste Personal 2
leuchtet, wenn Anwesenheit eingeschaltet ist
- 6 Mikrofon
- 7 Rote Ruftaste
leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln;
leuchtet hell, wenn Ruf ausgelöst wurde.
- 8 Display

Personalanwesenheit

Anwesenheit melden

Eine wesentliche Voraussetzung für den zweckmäßigen Gebrauch der Rufanlage ist die Anwesenheitsmeldung. Zwei Personalgruppen werden unterschieden: Personal 1 (z.B. Schwestern/Pfleger), Personal 2 (z.B. Ärztinnen/ Ärzte) Eingeschaltete Anwesenheitstasten:

- signalisieren die Personalanwesenheit.
- quittieren einen frischen Ruf in diesem Zimmer.
- bereiten den Empfang von Rufnachsendungen vor.
- bereiten die Auslösung von Notrufen vor. Das heißt, Rufe aus Zimmern mit eingeschalteter Anwesenheit werden mit höherer Priorität signalisiert.
- heben die Mithörsperre im Patientenzimmer auf.

Betreten des Zimmers:

- Grüne Anwesenheitstaste (Personal 1) oder gelbe Anwesenheitstaste (Personal 2) am ComTerminal oder an abgesetztem Anwesenheitstaster einschalten.
- ✓ Die Lichter von allen Anwesenheitstasten dieser Personalgruppe im Zimmer leuchten.

Verlassen des Zimmers:

- Grüne Anwesenheitstaste (Personal 1) oder gelbe Anwesenheitstaste (Personal 2) am ComTerminal oder an abgesetztem Anwesenheitstaster ausschalten.
- ✓ Die Lichter von allen Anwesenheitstasten im Zimmer sind dunkel.

Mithören sperren (Privat)

Falls Sie wünschen, dass niemand über das ComTerminal in das Patientenzimmer hineinhören kann, obwohl Personal anwesend gemeldet ist, können Sie die Mithörsperre von Hand aktivieren:

- Funktionstaste "Privat" drücken.
- ✓ Im Display steht "Privat *".
Die Mithörsperre ist aktiviert.
- Um die Mithörsperre wieder zu deaktivieren, die Funktionstaste "Privat *" drücken.
- ✓ Im Display steht "Privat".
Die Mithörsperre ist deaktiviert.

Rufenden helfen

Rufenden helfen

In einem anderen Zimmer wird Ihre Hilfe benötigt:

- Abmelden vom aktuellen Zimmer: Anwesenheitstaste ausschalten.
- Zum Rufort gehen.
- Anmelden am Rufort: Anwesenheitstaste einschalten.
- Den Hilfesuchenden versorgen. Bei Bedarf Unterstützung herbeirufen (siehe unten).
- Ruf abstellen:
Bei allen Rufen, die nicht im WC ausgelöst wurden, geschieht dieses automatisch, wenn Sie die Anwesenheitstaste ausschalten.
Bei Rufen aus WCs: Graue Abstelltaste im WC oder Funktionstaste "WC Abst." am ComTerminal drücken.
- Anwesenheitstaste ausschalten.

Unterstützung herbeirufen

Notruf auslösen

Sie sind im Patientenzimmer und brauchen Unterstützung:

- Rote Ruftaste am ComTerminal oder andere Ruftaste im Zimmer drücken.
- ✓ Das Licht der Ruftaste leuchtet hell. Bei eingeschalteter Anwesenheit wird ein Notruf signalisiert.

Hinweis: Ein Personalruf (Notruf) oder Alarmruf frischt einen abgefragten Ruf auf und muss vor dem Abstellen erneut abgefragt werden.

Alarmruf auslösen

Sie sind im Patientenzimmer und brauchen Unterstützung mit höchster Priorität (z.B. Herzteam):

- Blaue Alarmtaste am ComTerminal oder abgesetztem Alarmtaster drücken.
- ✓ Das Licht der Alarmtaste leuchtet.

Hinweis: Um Fehlbedienungen zu vermeiden, ist die im ComTerminal eingebaute Alarmtaste nur bei eingeschalteter Anwesenheit in Betrieb.

Nachgesendete Rufe abfragen (Nebenabfrage)

Wenn ein Ruf nicht innerhalb einer programmierten Zeit abgefragt wird, wird er an alle Zimmer mit eingeschalteter Anwesenheit nachgesendet.

Patientenruf ><
Zim.: 0107

Nachgesendete Rufe werden im Display des ComTerminal angezeigt und akustisch über einen Tongeber signalisiert:

Normaler Ruf: kurzer Ton, lange Pause, kurzer Ton, ...
Notruf: Ton, Pause, Ton, ...
Alarmruf: langer Ton, kurze Pause, langer Ton, ...


- Ruf abfragen, indem Sie die oberste Funktionstaste (neben dem Symbol "><") drücken.
- ✓ Die Sprechverbindung zum Rufort wird hergestellt.
Hinweis: Wenn der Sprechweg besetzt ist, z.B. weil jemand anders den Ruf abfragt, hören Sie einen Dauerton. *Hinweis:* Sie haben evtl. keinen Gesprächspartner bei Rufen aus dem WC (Sprechverbindung zum Zimmer) und Diagnostikrufen (Geräteruf).
- Zum Beenden des Gesprächs die Funktionstaste "Merken" drücken. ¹⁾
- ✓ Gespräch ist beendet.
- Beim Verlassen des Zimmers Anwesenheitstaste ausschalten. Zum Rufort gehen und Hilfesuchendem helfen.

1) Patientenruf abstellen

Nur bei einem Patientenruf haben Sie die Möglichkeit, den Ruf direkt abzustellen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie dem Hilfesuchenden schon im Gespräch helfen konnten und deshalb nicht zum Rufort gehen müssen.

- Statt der Funktionstaste "Merken" drücken Sie auf die Funktionstaste "Abstellen".
- ✓ Das Gespräch ist beendet. Die Rufbearbeitung ist abgeschlossen.

Hinweis: Bei einem Ruf von einer Türsprechstelle lösen Sie beim Drücken der Funktionstaste "Abstellen" den Türöffnungsmechanismus aus.

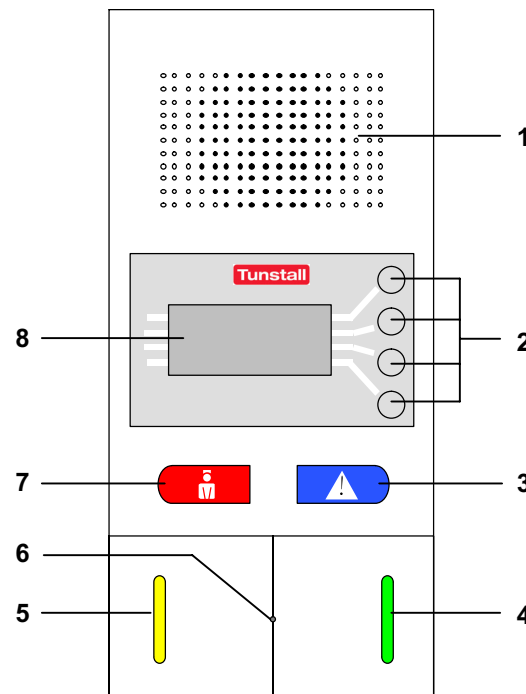

- 1 Lautsprecher
- 2 Vier Funktionstasten
Belegung situationsabhängig
- 3 Blaue Alarmtaste
leuchtet, wenn Alarm ausgelöst wurde
- 4 Grüne Anwesenheitstaste Personal 1
leuchtet, wenn Anwesenheit eingeschaltet ist
- 5 Gelbe Anwesenheitstaste Personal 2
leuchtet, wenn Anwesenheit eingeschaltet ist
- 6 Mikrofon
- 7 Rote Ruftaste
leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln;
leuchtet hell, wenn Ruf ausgelöst wurde.
- 8 Display



ComTerminal

Bestell-Nr. 74 0510 00

Gebrauchsanweisung