


Die Sensormatte

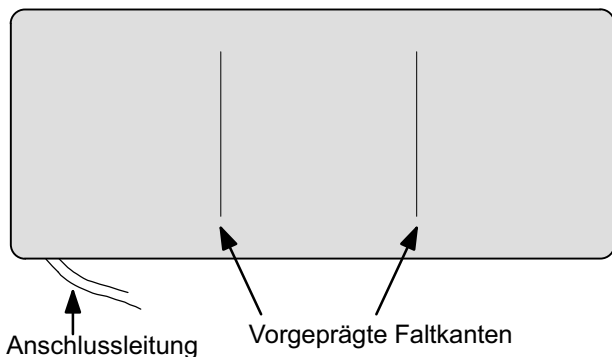

Funktion

Die Sensormatte ist eine großflächige Matte, die automatisch einen Ruf in der Rufanlage auslöst, wenn jemand auf die Matte tritt oder drückt. Die Sensormatte wird z.B. vor dem Bett platziert. Um die Sensormatte in Betrieb zu nehmen, muss ihr Stecker in die zugehörige Steckvorrichtung gesteckt werden. Wenn der Patient das Bett verlässt oder aus dem Bett auf die Sensormatte fällt, wird ein Ruf in der Rufanlage ausgelöst. Somit wird Pflegepersonal über das Ereignis informiert und kann die erforderlichen Maßnahmen einleiten. Wenn der Stecker der Sensormatte herausgezogen wird, wird der Abzug als Ruf in der Rufanlage signalisiert. Diese Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass ein versehentliches Außerbetriebnehmen der Sensormatte nicht unbemerkt bleibt.

Technische Daten

- Abmessungen: 1200 x 500 mm
- 4 m flexible Anschlussleitung
- Auslösedruck: 5 kg/40 cm²
- Spritzwassergeschützt
- Material: Weich-PVC
- Störungsüberwachung
- Schließer-Kontakt

Vor dem Gebrauch

Allgemeine Sicherheitshinweise



Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Knicken oder falten Sie die Sensormatte nicht. Sie würden die Sensormatte dadurch beschädigen. Sie dürfen die Sensormatte nur zur Lagerung an den beiden vorgeprägten Faltkanten zusammenlegen.
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf der Matte. Diese können die Sensormatte beschädigen und Fehlalarme auslösen.
- Setzen Sie die Sensormatte nie direkt Wasser aus. Zum Reinigen verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Die Sensormatte ist spritzwassergeschützt, jedoch nicht wasserdicht.
- Setzen Sie die Sensormatte keinen hohen Temperaturen aus. Die Sensormatte ist nicht hitzebeständig. Sie ist geeignet für die Verwendung bei bis zu +55 °C.
- Verwenden Sie die Sensormatte nur innerhalb von Gebäuden. Sie ist für die Verwendung im Freien nicht geeignet.
- Öffnen Sie die Sensormatte nicht.

Sensormatte für den Gebrauch vorbereiten



Legen Sie die Sensormatte auseinandergefaltet auf einen ebenen Untergrund.

Sensormatte benutzen



Beachten Sie beim Auslegen der Sensormatte:

- Die Sensormatte darf nicht im gefalteten Zustand benutzt werden. Dadurch könnte sie beschädigt werden.
- Die vorgeprägten Faltkanten sollten oben sein, damit Sie die Matte zur Lagerung zusammenlegen können ohne sie zu wenden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Sensormatte. Diese könnten die Sensormatte beschädigen oder Fehlalarme auslösen. Achten Sie z.B. darauf, dass das Bett nicht auf der Sensormatte steht.
- Es ist möglich z.B. eine leichte Teppichbrücke auf die Sensormatte zu legen. Führen Sie in diesem Fall jedoch unbedingt einen Funktionstest der Sensormatte mit aufgelegtem Teppich durch.
- Wenn die Sensormatte auf einem rutschigen Untergrund liegen soll, befestigen Sie die Sensormatte mit einem Klebestreifen auf dem Untergrund.
- Heben Sie die Sensormatte während der Benutzung nicht an - auch nicht an den Seiten. Sie würden einen Fehlalarm auslösen.

Sensormatte in Betrieb nehmen



Um die Sensormatte in Betrieb zu nehmen, stecken Sie den Stecker in eine Buchse an der zugehörigen Steckvorrichtung.

Funktionstest

Führen Sie einmal pro Woche einen Funktionstest durch. Betreten Sie dafür kurz die Sensormatte und prüfen Sie, ob ein Ruf in der Rufanlage ausgelöst wird.

Sensormatte außer Betrieb nehmen

Um die Sensormatte außer Betrieb zu nehmen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckvorrichtung. Das rote Leuchtfeld der Zimmerlampe leuchtet, um diesen "Abzugsruf" anzuzeigen. Wenn Sie beim Verlassen des Zimmers Ihre Anwesenheit ausschalten, wird der Abzugsruf abgestellt.

Lagerung

Zur Lagerung legen Sie die Sensormatte zusammen. Dabei dürfen Sie diese nur an den beiden vorgeprägten Faltkanten falten. Gehen Sie behutsam vor, d.h. knicken Sie die Sensormatte nicht fest ein.



Beachten Sie dabei:

- An anderen als den beiden vorgeprägten Faltkanten dürfen Sie die Sensormatte weder falten noch knicken. Dadurch könnte die Sensormatte beschädigt werden.
- Platzieren Sie auch bei der Lagerung keine Gegenstände auf der Sensormatte. Diese könnten die Sensormatte beschädigen.
- Im gefalteten Zustand darf keine weitere Sensormatte über der gefalteten gelagert werden. Diese könnte die Sensormatte beschädigen.
- Im ungefalteten Zustand dürfen drei Sensormatten übereinander gelagert werden.

Reinigung / Desinfektion

Die Sensormatte besteht aus Weich-PVC. Verwenden Sie nur Reinigungs- und Desinfektionsmittel, die für Weich-PVC geeignet sind. Zur Reinigung wischen Sie die Sensormatte mit einem feuchten Tuch ab. Hartnäckige Verunreinigungen bürsten Sie mit einer weichen Bürste mit einem milden Reinigungsmittel ab. Die Sensormatte ist geeignet zur handfeuchten Wischdesinfektion.

Verwendungsbereich

Die Sensormatte ist geeignet zur Verwendung mit folgenden Geräten: Steckvorrichtung (Best.-Nr. 19 0704x0 oder 10 0704 x0) angeschlossen an eine der folgenden Raumsteuerungen:

- Terminal, Best.-Nr. 19 0700 x0
- Terminal, Best.-Nr. 10 0700 xy, AT10 0700 xy
- Displaymodul, Best.-Nr. 19 0700 80
- Ruf-/Anwesenheitskombination Bus (RAB), Best.-Nr. 19 0701 00

Mit Raumsteuerungen anderer Best.-Nr. darf die Sensormatte nicht verwendet werden!

Mit folgenden Raumsteuerungen ist die Verwendung der Sensormatte eingeschränkt möglich:

- Displaymodul, Best.-Nr. 10 0700 8x, AT10 0700 8x
- Ruf-/Anwesenheitskombination Bus (RAB), Best.-Nr. 10 0701 xy, AT10 0701 xy

Bei diesen Raumsteuerungen wird ein Ruf nicht beim Betreten der Matte ausgelöst, sondern erst, wenn die Matte nach dem Betreten wieder verlassen wird.

Eine Rufauslösung findet also statt, wenn eine Person über die Matte läuft. **Eine Rufauslösung findet nicht statt, wenn eine Person auf die Matte fällt und liegen bleibt.**



Sensormatte CONCENTO

Bestell-Nr.: Z 00 8002 04

Gebrauchsanweisung