

Ruftaster, Best.-Nr. 75 0400 08


Rote Ruftaste zum Auslösen von Rufen.

Der Ruftaster ist geeignet zur Verwendung mit Hausnotrufgeräten von Tunstall GmbH oder in Personen-Hilferufanlagen der Communicall-Produktreihe.

Verbindungsleitung zum Hausnotrufgerät: Bestell-Nr. 75 0400 07.


Abmessungen (HxB): 80,5 x 80,5 mm

Hinweis: Der Ruftaster ist nicht überwacht.

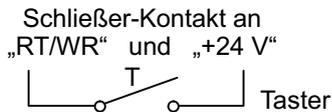

Hinweis! Zur vollständigen Installation des Systems beachten Sie den Anschlussplan für die jeweilige Anwendung.

A

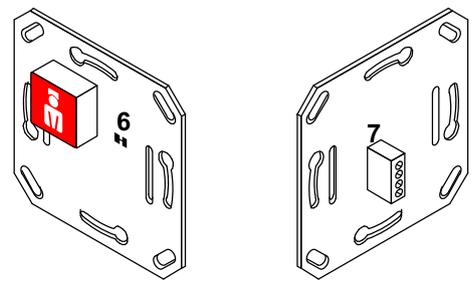

4 Frontseite

4 Rückseite

- 1 Zentralplatte
 - 2 Rahmen
 - 3* Schrauben der Einbaudose
 - 4 Ruftaster
 - 5* Einbaudose, 1-teilig
 - 6 Lötbrücke
 - 7 Anschlussklemme
- * Nicht im Lieferumfang enthalten.

Achtung!

Die Lötbrücke muss durchtrennt werden! Siehe Abb. B.

B



Lötbrücke 6 geschlossen



Lötbrücke 6 trennen z.B. mit Messer.



Lötbrücke 6 getrennt

Montage


Wandmontage auf einteilige Einbaudose.

1. Lötbrücke 6 durchtrennen, z.B. mit einem Messer, siehe Abb. B.
2. Anschlusskabel auf geeignete Länge abmanteln. Kabelschirm und Beidraht bis zum Kabelmantel entfernen.
3. Anschlusskabel anschließen.
4. Taster 4 mit den Schrauben 3 der Einbaudose auf der Einbaudose 5 anschrauben.
5. Zentralplatte 1 in den Rahmen 2 einlegen.
6. Zentralplatte 1 zusammen mit Rahmen 2 auf den Taster aufdrücken, bis sie hörbar beidseitig einrastet.


Hinweis zu der Anschlussklemme!

RT/WR und +24 V sind nur die Bezeichnungen an der Anschlussklemme. Bitte keine 24 V-Spannung anlegen.

C

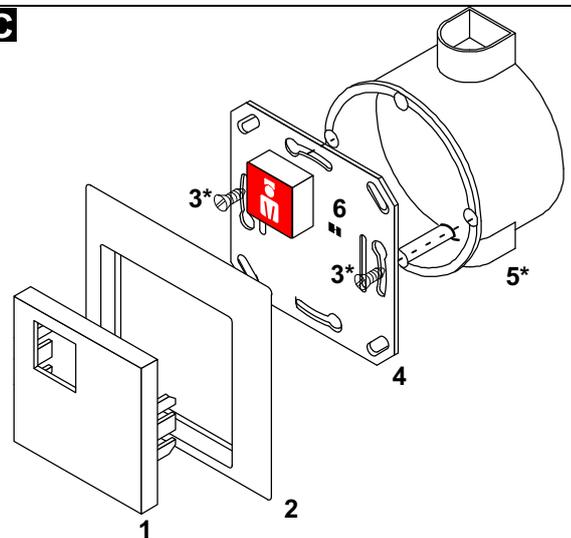

Anschlussklemme 7:

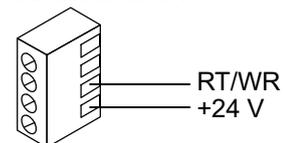

Demontage

1. Rahmen 2 und Zentralplatte 1 zusammen mit einem Schraubendreher von der Wand abhebeln, siehe Abb. D.
2. Schrauben 3 der Einbaudose lösen und Taster 4 von der Einbaudose abnehmen.
3. Anschlusskabel von der Anschlussklemme von der Rückseite des Tasters 4 abschrauben.

D

