

## TV



Im TV-Betrieb\* leuchtet die grüne LED in dem TV-Symbol [6].

### TV einschalten

- Auf das TV-Symbol [6] tippen.
- ✓ TV wird eingeschaltet. Die grüne LED im TV-Symbol [6] leuchtet. Hörfunk ist aus.

### Programm wählen


- Programm wählen durch mehrfaches Tippen auf die Pfeile des Programmwählers [5].



- ✓ Beim Tippen leuchtet die LED neben dem angetippten Pfeil kurz auf.

### Lautstärke einstellen

- Lautstärke einstellen durch mehrfaches Tippen auf die Symbole „+“ oder „-“ des Lautstärkereglers [7].

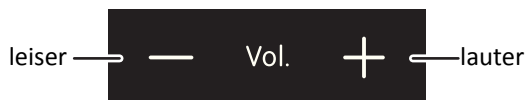

- ✓ Der Ton wird an dem Lautsprecher [2] übertragen. Wahlweise kann ein handelsüblicher Kopfhörer (3,5 mm Klinkestecker) an die Anschlussbuchse [10] angeschlossen werden.

### TV ausschalten

- Auf das TV-Symbol [6] tippen oder direkt zum Hörfunk wechseln durch kurzes Tippen auf das Hörfunk/Jalousie-Symbol [4].

\* *Hinweis!* In dieser Gebrauchsanweisung sind alle Funktionen des ePat<sup>®</sup>lite beschrieben. Abhängig von der Installation in Ihrem Krankenhaus ist jedoch evtl. nur eine Auswahl der Funktionen verfügbar. Von Ihrem Pflegepersonal erfahren Sie, welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen.

## Hörfunk



Im Hörfunk-Betrieb\* leuchtet die grüne LED in dem Hörfunk/Jalousie-Symbol [4].

### Hörfunk einschalten

- Kurz auf das Hörfunk/Jalousie-Symbol [4] tippen.
- ✓ Hörfunk wird eingeschaltet. Die grüne LED im Hörfunk/Jalousie-Symbol [4] leuchtet. TV ist aus.

*Hinweis!* Wenn die grüne LED im Hörfunk/Jalousie-Symbol blinkt, statt zu leuchten, haben Sie zu lang gedrückt und dadurch den Jalousie-Betrieb statt des Hörfunks eingeschaltet. Versuchen Sie es erneut.

### Programm wählen

- ✓ Die Anzahl leuchtender LEDs am Programmwähler [5] zeigt das aktuelle Hörfunk-Programm an.
- Programm wählen durch mehrfaches Tippen auf die Pfeile des Programmwählers [5].



### Lautstärke einstellen

- Lautstärke einstellen durch mehrfaches Tippen auf die Symbole „+“ oder „-“ des Lautstärkereglers [7].



- ✓ Der Ton wird an dem Lautsprecher [2] übertragen. Wahlweise kann ein handelsüblicher Kopfhörer (3,5 mm Klinkestecker) an die Anschlussbuchse [10] angeschlossen werden.

### Hörfunk ausschalten

- Auf das Hörfunk/Jalousie-Symbol [4] tippen oder direkt zum TV wechseln durch Tippen auf das TV-Symbol [6].

## Jalousie



Im Jalousie-Betrieb\* blinkt die grüne LED in dem Hörfunk/Jalousie-Symbol [4].

### Jalousie-Betrieb einschalten

Um die Jalousie herunter- oder herauffahren zu können, müssen Sie zunächst den Jalousie-Betrieb einschalten:

- Das Hörfunk/Jalousie-Symbol ca. drei Sekunden gedrückt halten und dann loslassen.
- ✓ Die grüne LED im Hörfunk/Jalousie-Symbol blinkt. Der Jalousie-Betrieb ist eingeschaltet.

*Hinweis!* Wenn die grüne LED im Hörfunk/Jalousie-Symbol leuchtet, statt zu blinken, haben Sie zu kurz gedrückt und dadurch den Hörfunk statt des Jalousie-Betriebs eingeschaltet. Versuchen Sie es erneut.

### Jalousie herunter-/herauffahren

Während der Jalousie-Betrieb eingeschaltet ist, können Sie die Jalousie herunter- und herauffahren:

- Jalousie herunter- oder herauffahren durch mehrfaches Tippen auf die Pfeile des Programmwählers [5].




- ✓ Beim Tippen leuchtet die LED neben dem angetippten Pfeil kurz auf.

Wenn Sie den Programmwähler [5] länger als fünf Sekunden nicht betätigen, wird der Jalousie-Betrieb automatisch ausgeschaltet.

## Halterung

- ePat<sup>®</sup>lite von oben in die Halterung hereinschieben.

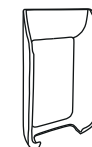

Halterung



## Serviceruf

*Hinweis!* Der Serviceruf ist nicht in jedem Krankenhaus verfügbar. Von Ihrem Pflegepersonal können Sie erfahren, ob der Serviceruf bei Ihnen verfügbar ist.




Mit dem Serviceruf können Sie nicht-medizinische Dienstleistungen bestellen.

- Wenn Sie einen nicht-medizinischen Wunsch haben, tippen Sie auf das blaue Serviceruf-Symbol [12].
- ✓ Zur Bestätigung Ihres Servicerufes blinkt die weiße LED neben dem Serviceruf-Symbol [12].
- ✓ Servicepersonal kommt zu Ihnen oder meldet sich über den Lautsprecher [2].
- Über das Mikrofon [9] können Sie antworten.
- Sie können die Lautstärke reduzieren durch Tippen auf das Symbol „-“ des Lautstärkereglers [7].

Sie können den Serviceruf löschen, z.B. wenn Sie ihn versehentlich ausgelöst haben:

- Um einen Serviceruf zu löschen, das Serviceruf-Symbol [12] drei Sekunden gedrückt halten, bis die weiße LED erlischt.

## Schwarzes Touchfeld abwischen

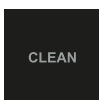

Wenn Sie das schwarze Touchfeld abwischen wollen, müssen Sie es vorübergehend deaktivieren:

- Zum Deaktivieren des schwarzen Touchfelds das CLEAN-Symbol [3] drei Sekunden gedrückt halten, bis alle LEDs aufleuchten.
- ✓ Solange die beiden grünen LEDs [4] und [6] leuchten (ca. acht Sekunden) hat das Touchfeld keine Funktion. Sie können es abwischen.

## Einen Ruf auslösen



Die rote Ruftaste [1] leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln.

- Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie die rote Ruftaste [1].
- ✓ Zur Bestätigung Ihres Rufes blinkt die Ruftaste [1] hell.
- ✓ Pflegepersonal kommt zu Ihnen oder meldet sich über den Lautsprecher [2].
- Über das Mikrofon [9] können Sie antworten.
- Sie können die Lautstärke reduzieren durch Tippen auf das Symbol „-“ des Lautstärkereglers [7].

## Raumlicht/Leselicht



Raumlicht

Leselicht

Das Leselicht-Symbol [8] leuchtet schwach zum Finden des Symbols im Dunkeln.

### Licht ein- und ausschalten

- Zum Ein- oder Ausschalten auf das entsprechende Lichtsymbol tippen.


### Licht dimmen

- Dimmbare Lichtquellen können Sie durch langes Drücken des Lichtsymbols dimmen.
- ✓ Mit jedem erneuten Drücken wechselt das Licht zwischen Aufwärts- und Abwärts-Dimmen.

### Licht gedimmt einschalten

- Das Lichtsymbol beim Einschalten gedrückt halten, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist.

**Tunstall**

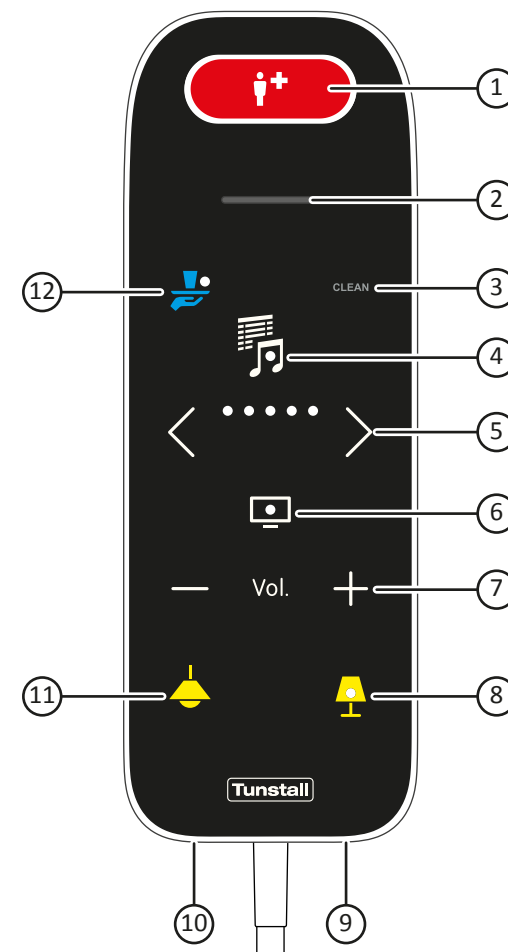

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| ① Rote Ruftaste           | ⑦ Lautstärkereglер    |
| ② Lautsprecher            | ⑧ Leselicht-Symbol    |
| ③ CLEAN-Symbol            | ⑨ Mikrofon            |
| ④ Hörfunk/Jalousie-Symbol | ⑩ Anschluss Kopfhörer |
| ⑤ Programmwähler          | ⑪ Raumlicht-Symbol    |
| ⑥ TV-Symbol               | ⑫ Serviceruf-Symbol   |

00 8803 84, 10/19 (Rev. 3.0)

**Patientenbediengerät ePat®lite**

77 0370 00

**Gebrauchsanweisung für Patienten**