

Flamenco-Systemfamilie

Reinigung und Desinfektion

Flamenco^{IP+}, Flamenco^{IP}, Flamenco

Rufanlagen für Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen



Unsere Politik der ständigen Weiterentwicklung bedeutet, dass sich Produktspezifikationen und Aussehen ohne Vorankündigung ändern können. Tunstall übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.

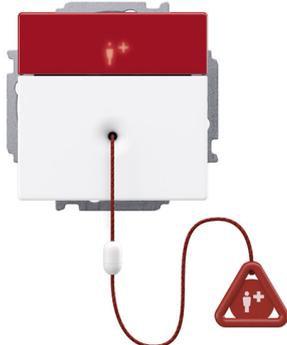
© 2022 Tunstall GmbH

1 Einleitung

Die Produkte der Rufanlagen sind speziell für den Einsatz im Krankenhaus konzipiert. Aus diesem Grund werden bei den Geräten nur solche Materialien verwendet, die den besonderen Anforderungen für den täglichen Gebrauch im Krankenhausalltag in vollem Umfang entsprechen.

Beachten Sie grundsätzlich die geltenden Hygienevorschriften für Ihr Krankenhaus.

2 Taster

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Zugtaster-Einsatz <i>exkl. Rahmen</i></p> <p>Taster-Einsatz mit einer roten Ruftaste, Zugschnur, Sicherheitsverschluss und Rufgriff.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Geräts geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none">– Gehäuse, Taste: Polycarbonat– Zugschnur: Polyamid– Rufgriff: ABS	29 0707 20F	 The image shows a pull button assembly. It consists of a white rectangular base with a red top section. A red cord is attached to the base and ends in a red triangular warning symbol with a white exclamation mark. The cord is connected to a small white component on the base.

Funktionen	Bestell-Nr.	
Taster <i>mit Kunststoffrahmen</i>	77 0211 00 A 77 0211 00 F	
Reinigung und Desinfektion Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.	77 0211 01 A 77 0211 01 F 77 0212 00 A 77 0212 00 F 77 0213 00 A 77 0213 00 F	
Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material des Tasters geeignet ist:	77 0214 00 A 77 0214 00 F	
– Gehäuse, Rahmen, Taste: Polycarbonat	77 0217 00 A 77 0217 00 F	
	77 0218 00 A 77 0218 00 F	
	77 0219 00 A 77 0219 00 F	
		
		

Funktionen	Bestell-Nr.	
Taster <i>mit Glas-Dekorrahmen</i>	77 0211 00 C	
	77 0211 01 C	
Reinigung und Desinfektion	77 0212 00 C	
Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.	77 0213 00 C	
	77 0214 00 C	
	77 0217 00 C	
	77 0218 00 C	
	77 0219 00 C	
Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material des Tasters geeignet ist:		
<ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse, Rahmen, Taste: Polycarbonat – Rahme: Weißglas 		
		
		
		

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Rufzugtaster <i>mit Kunststoffrahmen</i></p> <p>Taster mit Zugschnur, Sicherheitsverschluss und Rufgriff.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Geräts geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse, Rahmen: Polycarbonat – Zugschnur: Polyamid – Rufgriff: ABS 	<p>77 0215 00 A</p> <p>77 0215 00 F</p> <p>77 0215 01 A</p> <p>77 0215 01 F</p>	
<p>Rufzugtaster <i>mit Glas-Dekorrahmen</i></p> <p>Taster mit Zugschnur, Sicherheitsverschluss und Rufgriff.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Geräts geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: Polycarbonat – Rahmen: Weißglas – Zugschnur: Polyamid – Rufgriff: ABS 	<p>77 0215 00 C</p> <p>77 0215 01 C</p>	

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Pneumatischer Ruftaster <i>mit Kunststoffrahmen</i></p> <p>Taster zum Auslösen von Rufen durch Zusammendrücken des elastischen Balls.</p>	<p>77 0216 00 A 77 0216 00 F 77 0216 01 A 77 0216 01 F</p>	
<p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Tasters geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse, Rahmen: Polycarbonat – Elastischer Ball: Weich-PVC <p>Hinweis zu dem elastischen Ball</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reinigen Sie den Ball mit reichlich Wasser und etwas Seifenlauge. – Keine Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, keine Öle, Fette, Lösungsmittel und Säuren verwenden. Diese können den Ball schädigen. – Zur Wischdesinfektion empfiehlt der Hersteller ein aldehyd- und alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel. – Empfehlenswert ist die Wischdesinfektion mit Microbac® von Hartmann (Bode Chemie). 		

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Pneumatischer Ruftaster mit Glas-Dekorrahmen</p> <p>Taster zum Auslösen von Rufen durch Zusammendrücken des elastischen Balls.</p>	<p>77 0216 00 C 77 0216 01 C</p>	
<p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Tasters geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: Polycarbonat – Rahmen: Weißglas – Elastischer Ball: Weich-PVC 		
<p>Hinweis zu dem elastischen Ball</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reinigen Sie den Ball mit reichlich Wasser und etwas Seifenlauge. – Keine Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, keine Öle, Fette, Lösungsmittel und Säuren verwenden. Diese können den Ball schädigen. – Zur Wischdesinfektion empfiehlt der Hersteller ein aldehyd- und alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel. – Empfehlenswert ist die Wischdesinfektion mit Microbac® von Hartmann (Bode Chemie). 		

3 Raumterminals

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>ComTerminal^P</p> <p>Kommunikationsterminal in Patientenzimmern, Dienstzimmern und Funktionsräumen.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten.</p> <p>Die Frontscheibe des Gerätes besteht aus Echtglas und erlaubt eine einfache Wischdesinfektion. Bevor Sie die Frontscheibe abwischen können, müssen Sie das Touchdisplay und die Tasten vorübergehend außer Funktion setzen, indem Sie auf das Wort „Reinigung“ im Display tippen.</p> <p>Das rückwärtige Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und hat Öffnungen (für Mikrofon, Lautsprecher...), in die keine Flüssigkeit eindringen darf.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Gerätes geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none">– Gehäuse: ABS– Bedienfront: Echtglas	<p>76 0510 00</p> <p>76 0510 10</p>	 A vertical, wall-mounted terminal device with a touch display and buttons. The display shows a circular icon with a checkmark and the word 'Reinigung' below it. Below the display are two buttons, one yellow and one green. The device is mounted on a light-colored wall.

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>ComTerminal Flamenco</p> <p>Kommunikationsterminal in Patientenzimmern, Dienstzimmern und Funktionsräumen.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten.</p> <p>Die Frontscheibe des Gerätes besteht aus Echtglas und erlaubt eine einfache Wischdesinfektion. Bevor Sie die Frontscheibe abwischen können, müssen Sie die Tasten vorübergehend außer Funktion setzen, indem Sie auf die Funktionstaste „Clean“ tippen.</p> <p>Das rückwärtige Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und hat Öffnungen (für Mikrofon, Lautsprecher...), in die keine Flüssigkeit eindringen darf.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Gerätes geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Bedienfront: Echtglas 	<p>76 0510 00</p> <p>76 0510 10</p>	

Funktionen	Bestell-Nr.
<p>ComTerminal Flamenco, Tischaufstellung</p> <p>Kommunikationsterminal in Arztzimmern etc.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten.</p> <p>Die Bedienoberfläche des Gerätes besteht aus Echtglas und erlaubt eine einfache Wischdesinfektion. Bevor Sie die Bedienoberfläche abwischen können, müssen Sie die Tasten vorübergehend außer Funktion setzen, indem Sie auf die Funktionstaste „Clean“ tippen.</p> <p>Das rückwärtige Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und hat Öffnungen (für Mikrofon, Lautsprecher ...), in die keine Flüssigkeit eindringen darf.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Gerätes geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Bedienoberfläche: Echtglas – Tischfuß: Plexiglas XT – Anschlussleitung: Weich-PVC 	<p>77 0511 00</p> 

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>ZimmerTerminal Flamenco</p> <p>Zimmerterminal in Patientenzimmern, Dienstzimmern und Funktionsräumen.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Gerätes geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Bedienfront: Polyester – Tastenkuppen: Polyurethan – Display: Gegossenes PMMA <p>Hinweis zu den Folientasten</p> <p>Die Tasten können durch häufigen Kontakt mit alkoholhaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln beschädigt werden. Der Hersteller rät deshalb zu Flächendesinfektionsmitteln, die üblicherweise vor der Anwendung aus Konzentraten und Wasser hergestellt werden.</p> <p>Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösungen zur Schnelldesinfektion wie z.B. Mikrocid® sensitive liquid von Schülke & Mayr können ebenfalls verwendet werden.</p>	77 0520 00	

Funktionen	Bestell-Nr.
<p>ZimmerTerminal Flamenco, Tischaufstellung</p> <p>Zimmerterminal. Tischaufstellung in Arztzimmern etc.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Gerätes geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Bedienfront: Polyester – Tastenkuppen: Polyurethan – Display: Gegossenes PMMA – Tischfuß: Plexiglas transparent – Anschlussleitung: Weich-PVC <p>Hinweis zu den Folientasten</p> <p>Die Tasten können durch häufigen Kontakt mit alkoholhaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln beschädigt werden. Der Hersteller rät deshalb zu Flächendesinfektionsmitteln, die üblicherweise vor der Anwendung aus Konzentraten und Wasser hergestellt werden.</p> <p>Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösungen zur Schnelldesinfektion wie z.B. Mikrocid® sensitive liquid von Schülke & Mayr können ebenfalls verwendet werden.</p>	<p>77 0521 00</p> 

4 Steckvorrichtungen

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Steckvorrichtung mit Ruftaste <i>mit Kunststoffrahmen</i></p> <p>Steckvorrichtung für zwei Rufgeräte, mit Ruf-taste. Wandmontage.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellö-sung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheu-ernden oder Kunststoff lösenden Inhalts-stoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Ver-wendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material der Steckvorrichtung geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none">– Gehäuse, Rahmen, Front der Ruftaste: Polycarbonat– Gehäuse der Ruftaste: PBT	<p>70 0171 60 A</p> <p>70 0171 60 F</p>	 A photograph of a white, square wall-mounted device. On the left side, there is a red square button with a white 'S' and 'M' symbol. To the right of the button are two black circular ports, one above the other. The device is mounted on a light-colored wall.

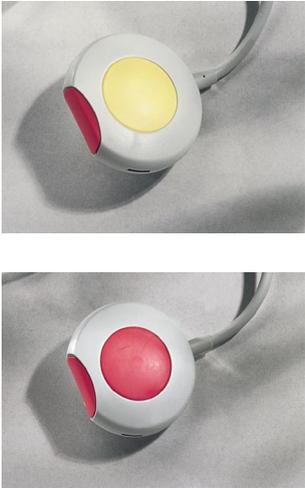
Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Steckvorrichtung mit Ruftaste <i>mit Glas-Dekorrahmen</i></p> <p>Steckvorrichtung für zwei Rufgeräte, mit Ruftaste. Wandmontage.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material der Steckvorrichtung geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse, Front der Ruftaste: Polycarbonat – Rahmen: Weißglas – Gehäuse der Ruftaste: PBT 	70 0171 60 C	
<p>Steckvorrichtung mit Ruftaste, Kanal</p> <p>Steckvorrichtung für zwei Rufgeräte, mit Ruftaste. Einbau in medizinische Versorgungseinheit.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material der Steckvorrichtung geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: Polycarbonat – Front der Ruftaste: Polycarbonat – Gehäuse der Ruftaste: PBT 	70 0171 50	

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Steckvorrichtung Kombi <i>Farbe: Papyrusweiß</i></p> <p>Steckvorrichtung um Anschluss von Bedien- und Rufgeräten. Wandmontage.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material der Steckvorrichtung geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Material: ABS 	<p>70 0424 00 70 0424 50</p>	
<p>Steckvorrichtung Kombi <i>Farbe: Studioweiß</i></p> <p>Steckvorrichtung um Anschluss von Bedien- und Rufgeräten. Wandmontage.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material der Steckvorrichtung geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Material: Polycarbonat 	<p>70 0425 00 70 0425 50</p>	

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Steckvorrichtung Kombi Kanal <i>Farbe: Papyrusweiß</i></p> <p>Steckvorrichtung um Anschluss von Bedien- und Rufgeräten. Einbau in medizinische Versorgungseinheit.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material der Steckvorrichtung geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Material: ABS 	<p>70 0434 00 70 0434 50</p>	
<p>Steckvorrichtung Kombi Kanal <i>Farbe: Studioweiß</i></p> <p>Steckvorrichtung um Anschluss von Bedien- und Rufgeräten. Einbau in medizinische Versorgungseinheit.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für das Material der Steckvorrichtung geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Material: Polycarbonat 	<p>70 0435 00 70 0435 50</p>	

5 Patientengeräte

Funktionen	Bestell-Nr.
<p>ePat[®]lite</p> <p>Kommunikations- und Bediengerät zum Einsatz am Patientenbett.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Grundsätzlich unbedenklich ist die Reinigung des Geräts und der Halterung mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von verdünnten und rückstandsfreien Haushaltsreinigern oder Spülmitteln.</p> <p>Achten Sie darauf, dass keine Nässe in die Anschlussbuchse für den Kopfhörer gelangt.</p> <p>Keine harzenden oder klebenden Reinigungsmittel verwenden. Nicht rückstandsfreie Reinigungsmittel setzen sich z.B. in den Lautsprecherspalt.</p> <p>Bevor Sie das Touchfeld abwischen, müssen Sie den Stecker des Gerätes abziehen oder das CLEAN-Symbol 3 Sekunden gedrückt halten, um das Touchfeld vorübergehend zu deaktivieren.</p> <p>Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Reinigungs- und des Desinfektionsmittels die Materialeigenschaften des Gerätes:</p> <ul style="list-style-type: none">– Weiße Gehäuseschale, Ruftaste, Gerätehalterung: ASA/PC– Das schwarze Touchfeld ist mit einer PET-Folie überzogen.– Anschlussleitung, Stecker: Weich-PVC	<p>77 0370 00</p> 

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>Birntaster <i>rundes Gehäuse</i></p> <p>Feuchtigkeitsgeschützter Ruftaster.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät oder den Stecker eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Birntasters geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Tasten: Thermoplastisches Elastomer – Anschlussleitung: Weich-PVC 	<p>70 0710 00</p> <p>70 0710 01</p> <p>70 0711 00</p> <p>70 0711 01</p>	
<p>Birntaster <i>eckiges Gehäuse</i></p> <p>Wassergeschützter Ruftaster.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät oder den Stecker eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Birntasters geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Tasten: Hartbeschichtete Polyesterfolie – Anschlussleitung: Weich-PVC 	<p>70 0712 00</p>	

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>PBK Hand</p> <p>Kommunikations- und Bediengerät zum Einsatz am Patientenbett.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Grundsätzlich unbedenklich ist die Reinigung des Geräts und der Halterung mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von verdünnten und rückstandsfreien Haushaltsreinigern oder Spülmitteln.</p> <p>Achten Sie darauf, dass keine Nässe in die Anschlussbuchse für den Kopfhörer gelangt.</p> <p>Keine harzenden oder klebenden Reinigungsmittel verwenden. Nicht rückstandsfreie Reinigungsmittel setzen sich z.B. in den Lautsprecheröffnungen.</p> <p>Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Reinigungs- und des Desinfektionsmittels die Materialeigenschaften des Gerätes:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse, Gerätehalterung: ABS – Tasten und Geräteumrandung: Silicone Rubber – Anschlussleitung, Stecker: Weich-PVC 	74 0747 00	

6 Abfragestellen

Funktionen	Bestell-Nr.
<p data-bbox="199 474 395 515">ComStation^{IP}</p> <p data-bbox="199 577 724 640">Stationsabfragestelle. Tischaufstellung oder Wandmontage am Dienststützpunkt.</p> <ul data-bbox="199 667 743 958" style="list-style-type: none">– Halten Sie das Gerät sauber und trocken, sonst kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.– Verwenden Sie Desinfektionsmittel NICHT zu häufig.– Verwenden Sie KEIN hochgradiges oder gar reines Desinfektionsmittel. Es könnte das Gerät beschädigen. <p data-bbox="199 1003 571 1034">Reinigung und Desinfektion</p> <p data-bbox="199 1048 746 1317">Reinigen und desinfizieren Sie das Gerät im abgemeldeten Zustand, damit keine unerwünschten Funktionen ausgelöst werden. Falls beim Reinigen oder Desinfizieren des Geräts versehentlich die Schaltfläche „ANMELDEN“ ausgelöst wird, wird der Home-Bildschirm angezeigt. Melden Sie sich wieder ab.</p> <p data-bbox="199 1344 746 1473">Für die tägliche Staub- und Fingerabdruckentfernung verwenden Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Bildschirm-Reinigungstuch, um das Gerät abzuwischen.</p> <p data-bbox="199 1500 730 1630">Das Gehäuse des Geräts und der Handhörer bestehen aus ABS. Der Touchscreen besteht aus Glas. Das Spiralkabel des Handhörers ist mit Weich-PVC ummantelt.</p> <p data-bbox="199 1657 715 1720">Zur Desinfektion können Sie medizinischen Alkohol oder Isopropanol verwenden.</p> <ol data-bbox="199 1747 746 1966" style="list-style-type: none">1. Sprühen Sie eine kleine Menge Desinfektionsmittel auf Bildschirm, Handhörer und andere Stellen, die von den Benutzern leicht berührt werden können.2. Wischen Sie das Gerät mit dem Bildschirm-Reinigungstuch ab.	<p data-bbox="769 474 906 510">76 0605 50</p> 

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p>ComStation^{BUS-C}</p> <p>Stationsabfragestelle. Tischaufstellung oder Wandmontage am Dienststützpunkt.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten. Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien der ComStation geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Folientasten: Polyesterfolie mit Polyurethan. – Display: Polycarbonat – Spiralkabel zum Handhörer: Weich-PVC oder Polyurethan <p>Hinweis zu den Folientasten</p> <p>Die Tasten können durch häufigen Kontakt mit alkoholhaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln beschädigt werden. Der Hersteller rät deshalb zu Flächendesinfektionsmitteln, die üblicherweise vor der Anwendung aus Konzentraten und Wasser hergestellt werden.</p> <p>Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösungen zur Schnelldesinfektion wie z.B. Mikrozyd[®] sensitive liquid von Schülke & Mayr können ebenfalls verwendet werden.</p>	77 0605 50	

Funktionen	Bestell-Nr.
<p>ComStation^{CT} Flamenco</p> <p>Tischterminal am Dienststützpunkt.</p> <p>Reinigung und Desinfektion</p> <p>Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten.</p> <p>Die Bedienoberfläche des Gerätes besteht aus Echtglas und erlaubt eine einfache Wischdesinfektion. Bevor Sie die Bedienoberfläche abwischen können, müssen Sie die Tasten vorübergehend außer Funktion setzen, indem Sie auf die Funktionstaste „Clean“ tippen.</p> <p>Das rückwärtige Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und hat Öffnungen (für Mikrofon, Lautsprecher ...), in die keine Flüssigkeit eindringen darf.</p> <p>Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Gerätes geeignet ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Bedienoberfläche: Echtglas – Tischfuß: Plexiglas XT – Anschlussleitung: Weich-PVC 	<p>77 0606 00</p> 

Funktionen	Bestell-Nr.	
<p data-bbox="277 300 608 338">ComStation^T Flamenco</p> <p data-bbox="277 400 703 432">Tischterminal am Dienststützpunkt.</p> <p data-bbox="277 472 647 504">Reinigung und Desinfektion</p> <p data-bbox="277 521 815 685">Reinigung mit einem mit milder Spülmittellösung angefeuchteten, weichen, kratzfreiem Tuch. Die Spülmittellösung darf keine scheuernden oder Kunststoff lösenden Inhaltsstoffe enthalten.</p> <p data-bbox="277 712 807 810">Handfeuchte Wischdesinfektion unter Verwendung eines Desinfektionsmittels, das für die Materialien des Gerätes geeignet ist:</p> <ul data-bbox="277 837 671 1093" style="list-style-type: none"> – Gehäuse: ABS – Bedienfront: Polyester – Tastenkuppen: Polyurethan – Display: Gegossenes PMMA – Tischfuß: Plexiglas transparent – Anschlussleitung: Weich-PVC <p data-bbox="277 1133 651 1164">Hinweis zu den Folientasten</p> <p data-bbox="277 1182 807 1415">Die Tasten können durch häufigen Kontakt mit alkoholhaltigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln beschädigt werden. Der Hersteller rät deshalb zu Flächendesinfektionsmitteln, die üblicherweise vor der Anwendung aus Konzentraten und Wasser hergestellt werden.</p> <p data-bbox="277 1442 807 1572">Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösungen zur Schnelldesinfektion wie z.B. Mikrocid[®] sensitive liquid von Schülke & Mayr können ebenfalls verwendet werden.</p>	77 0606 20	

Tunstall GmbH
Orkotten 66
48291 Telgte, Germany
t: +49 (0) 2504/701-0
e: DE.Info@tunstall.com
w: tunstall.de

