
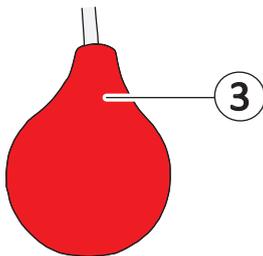


CONCENTO^{CARE}

Gebrauchsanweisung für Ihre Rufanlage

Einen Ruf auslösen:


Alle roten Tasten oder Bedienelemente Ihrer Rufanlage dienen zum Auslösen von Rufen.

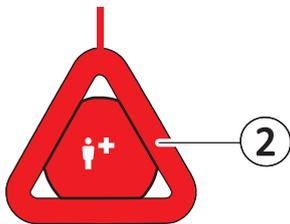

Wenn Sie Hilfe benötigen:


- drücken Sie eine rote Ruftaste [1],
- ziehen Sie an einer roten Rufschnur [2]
- oder drücken Sie einen roten Rufball [3].

Zur Bestätigung Ihres Rufs leuchtet das Symbol der Ruftaste [1] hell auf.

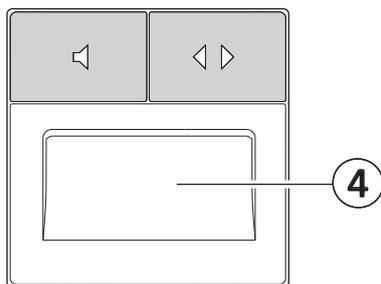

Pflegepersonal kommt zu Ihnen oder meldet sich über den Lautsprecher [4].

Sie können direkt antworten, ohne eine weitere Taste zu drücken.

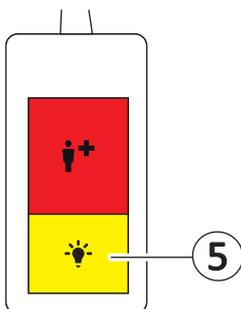

Licht ein- und ausschalten:

- Drücken Sie die gelbe Licht-Taste [5]. Hierbei wird kein Ruf ausgelöst!