
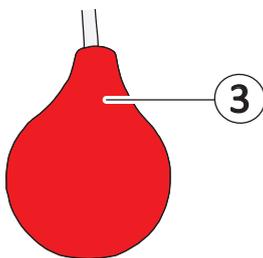


CONCENTO<sup>CARE</sup>

## Gebrauchsanweisung für Ihre Rufanlage

### Einen Ruf auslösen:


Alle roten Tasten oder Bedienelemente Ihrer Rufanlage dienen zum Auslösen von Rufen.

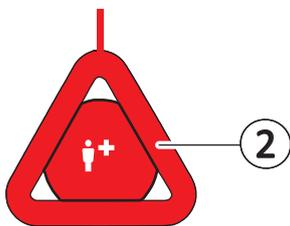

### Wenn Sie Hilfe benötigen:

- drücken Sie eine rote Ruftaste [1],
- ziehen Sie an einer roten Rufschnur [2]
- oder drücken Sie einen roten Rufball [3].

Zur Bestätigung Ihres Rufs leuchtet das Symbol der Ruftaste [1] hell auf. Pflegepersonal kommt zu Ihnen

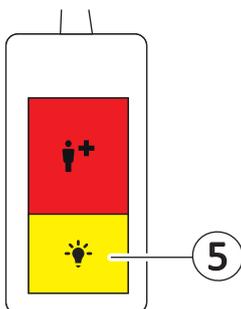

### Licht ein- und ausschalten:

- Drücken Sie die gelbe Licht-Taste [5]. Hierbei wird kein Ruf ausgelöst!