


Nebenabfrage -1-

1. Anzeige von nachgesendeten Rufen


Wenn ein Ruf nicht innerhalb einer programmierten Zeit abgefragt wird, wird er an alle Zimmer mit eingeschalteter Anwesenheit nachgesendet. Nachgesendete Rufe werden im Display des ComTerminal^{IP} angezeigt und akustisch über einen Tongeber signalisiert:

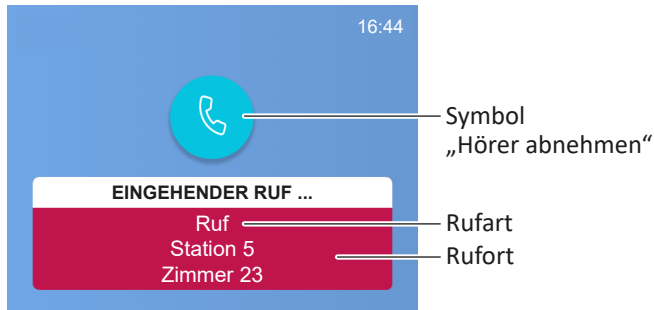

- Ruf: kurzer Ton, lange Pause, kurzer Ton, ...
- Notruf: Ton, Pause, Ton, ...
- Alarm: langer Ton, kurze Pause, langer Ton, ...

2. Ruf annehmen

- Ruf annehmen, indem Sie das Symbol „Hörer abnehmen“ antippen.
- ✓ Der Ruf wird angenommen. Das Display zeigt:

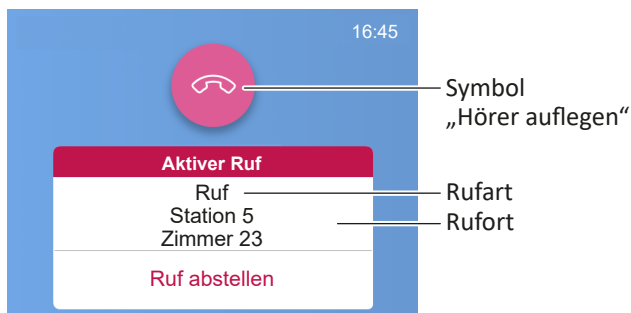

Wenn möglich wird eine Sprechverbindung zum Rufort hergestellt.

Nebenabfrage -2-

3. Rufendem helfen


- Sprechen Sie den Hilfesuchenden an und fragen ihn, welche Hilfe er benötigt.
- Zum Beenden des Gesprächs bzw. Schließen der Rufanzeige und Merken des Rufes das Symbol „Hörer auflegen“ antippen.¹⁾
- ✓ Das Gespräch ist beendet. Die Rufanzeige ist geschlossen.
- Beim Verlassen des Zimmers Anwesenheit ausschalten.
- Zum Rufort gehen und Hilfesuchendem helfen.

¹⁾ Rufart „Ruf“ abstellen

Nur bei der Rufart „Ruf“, d.h. bei einem Ruf von einem Patienten, haben Sie die Möglichkeit, den Ruf direkt abzustellen. Dieses ist sinnvoll, wenn Sie dem Hilfesuchenden schon im Gespräch helfen konnten und deshalb nicht zum Rufort gehen müssen.

- Statt auf das Symbol „Hörer auflegen“ tippen Sie auf „Ruf abstellen“.
- ✓ Das Gespräch ist beendet. Der Ruf ist abgestellt. Die Rufbearbeitung ist abgeschlossen.

Tunstall

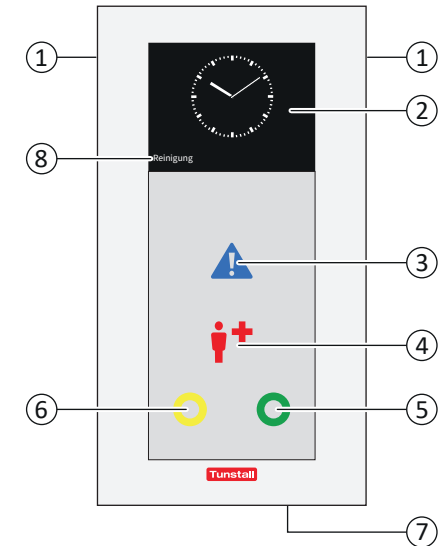

- ① **Lautsprecher**
- ② **Touchdisplay**
- ③ **Blaue Alarmtaste (wenn vorhanden)**
leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln. Blinkt hell, wenn Alarm am ComTerminal^{IP} ausgelöst wurde. Taste nur aktiv bei eingeschalteter Anwesenheit.
- ④ **Rote Ruftaste**
leuchtet schwach zum Finden der Taste im Dunkeln. Blinkt hell, wenn Ruf am ComTerminal^{IP} ausgelöst wurde.
- ⑤ **Grüne Anwesenheitstaste Personal 1**
leuchtet, wenn Anwesenheit 1 eingeschaltet ist.
- ⑥ **Gelbe Anwesenheitstaste Personal 2**
leuchtet, wenn Anwesenheit 2 eingeschaltet ist.
- ⑦ **Mikrofon**
- ⑧ **Taste „Reinigung“**
zur vorübergehenden Deaktivierung des Touchdisplays und der Tasten am ComTerminal^{IP}.

00 8804 45, 06/21 (Rev. 5.0)

ComTerminal^{IP}

Bestell-Nr. 76 0510 00, 76 0510 10

Gebrauchsanweisung

Anwesenheit melden

Eine Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Rufanlage ist die Anwesenheitsmeldung.

Zwei Personalgruppen werden unterschieden:

- Personal 1 (z.B. Schwestern/Pfleger)
- Personal 2 (z.B. Ärztinnen/Ärzte)

Eingeschaltete Anwesenheit

- signalisiert die Personalanwesenheit im Zimmer.
- quittiert einen frischen Ruf in diesem Zimmer.
- bereitet den Empfang von Rufnachsendungen vor.
- bereitet die Auslösung von Notrufen vor. Das heißt, aus Zimmern mit eingeschalteter Anwesenheit werden mit höherer Priorität signalisiert.
- setzt die blauen Alarmpasten (am ComTerminal^{IP} und an abgesetzten Alarmpasten) in Betrieb. Das heißt, das Drücken einer Alarmpaste löst nur bei eingeschalteter Anwesenheit einen Alarm aus.
- hebt die Mithörsperre für dieses Zimmer auf.

Betretten des Zimmers

- Anwesenheitstaste (grün: Personal 1, gelb: Personal 2) am ComTerminal^{IP} oder an abgesetztem Anwesenheitstaster einschalten.
- ✓ Die Lichter von allen Anwesenheitstasten dieser Personalgruppe im Zimmer leuchten.

Verlassen des Zimmers

- Anwesenheitstaste (grün: Personal 1, gelb: Personal 2) am ComTerminal^{IP} oder an abgesetztem Anwesenheitstaster ausschalten.
- ✓ Die Lichter von allen Anwesenheitstasten dieser Personalgruppe im Zimmer sind aus.

Displayschoner

Wenn sich das Display mehrere Minuten im Ruhezustand befindet, schaltet es automatisch aus.

- Um das Display zu reaktivieren, auf das Display tippen.


Rufendem helfen

In einem anderen Zimmer wird Ihre Hilfe benötigt:

1. Abmelden vom aktuellen Zimmer: Anwesenheitstaste ausschalten.
2. Zum Rufort gehen.
3. Anmelden am Rufort: Anwesenheitstaste einschalten.
4. Den Hilfesuchenden versorgen. Bei Bedarf Unterstützung herbeirufen (siehe rechts).
5. Ruf abstellen:
Bei allen Rufen, die nicht im WC ausgelöst wurden, geschieht dieses automatisch, wenn Sie die Anwesenheit ausschalten. Bei Rufen aus WCs die graue Abstelltaste im WC drücken.
6. Anwesenheit ausschalten.

Rufort WC

WC-Rufe und WC-Notrufe werden im WC-Bereich ausgelöst. Um auf diesen Rufort aufmerksam zu machen, zeigt das Display des ComTerminals^{IP} diese Information an:



WC-Ruf
Lokal

Sonderfall: Hilfe ist schon am Rufort

Wenn ein Ruf in dem Zimmer ausgelöst wird, wo Sie sich gerade aufhalten und Sie ohne Unterstützung von außen helfen können, müssen Sie die Anwesenheitstaste betätigen, bevor Sie den Ruf abstellen können.

Frontscheibe abwischen

Die Frontscheibe des ComTerminals^{IP} besteht aus Glas und erlaubt eine einfache Wischdesinfektion. Bevor Sie die Frontscheibe abwischen können, müssen Sie das Touchdisplay und die Tasten außer Funktion setzen:

- Während die Anwesenheit ausgeschaltet ist, steht das Wort „Reinigung“ im Display. Tippen Sie das Wort an.
- ✓ Das Touchdisplay und die Tasten sind für mehrere Sekunden (siehe Displayanzeige) außer Funktion und können abgewischt werden.

HINWEIS! Das rückwärtige Gehäuse besteht aus ABS-Kunststoff und hat Öffnungen (für Mikrofon, Lautsprecher ...), in die keine Flüssigkeit eindringen darf.

Unterstützung herbeirufen

Notruf auslösen

Sie sind im Zimmer und benötigen Unterstützung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwesenheit eingeschaltet ist.
- Rote Ruftaste am ComTerminal^{IP} oder andere Ruftaste im Zimmer betätigen.
- ✓ Das Licht der betätigten Ruftaste leuchtet bzw. blinkt (ComTerminal^{IP}) hell. Ein Notruf wird ausgelöst.

Alarm auslösen

WARNUNG! Alarmpasten sind nur bei eingeschalteter Anwesenheit in Betrieb.

Sie sind im Zimmer und benötigen Unterstützung mit höchster Priorität (z.B. Herzteam):

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwesenheit eingeschaltet ist.
- Blaue Alarmpaste am ComTerminal^{IP} oder abgesetztem Alarmpaster betätigen.
- ✓ Das Licht der betätigten Alarmpaste leuchtet bzw. blinkt (ComTerminal^{IP}) hell. Ein Alarm wird ausgelöst.

Mithören sperren

Falls Sie es wünschen, dass niemand über das ComTerminal^{IP} in das Zimmer hineinhören kann, obwohl die Anwesenheit eingeschaltet ist, können Sie die Mithörsperre manuell aktivieren:

- Das Symbol „Mikrofon“ im Touchdisplay antippen.
- ✓ Das Symbol wechselt zu einem „durchgestrichenem Mikrofon“. Die Mithörsperre ist aktiviert.
- Um die Mithörsperre zu deaktivieren, das Symbol „durchgestrichenes Mikrofon“ antippen.
- ✓ Das Display zeigt das Symbol „Mikrofon“. Die Mithörsperre ist deaktiviert.



„Mikrofon“
Mithörsperre ist aus.



„Durchgestrichenes Mikrofon“
Mithörsperre ist aktiv.