

RAN-Schnittstelle für externes Rufgerät, Bestell-Nr. 77 0881 00

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die RAN-Schnittstelle dient zum Anschluss der Ruf-Funktion eines Patientenbediengeräts eines Fremdherstellers an den Zimmerbus (RAN) einer Rufanlage der Flamenco-Systemfamilie.

Verwendung eines Patientenbediengeräts nur nach Freigabe durch Tunstall GmbH.

Abmessungen (HxBxT): 13 x 51 x 95 mm (ohne Befestigungsclips)

Gewicht: 28 g (ohne Befestigungsclips)



HINWEIS! Die vollständige Installation des Systems ist im Technischen Handbuch beschrieben.




VORSICHT! Die Leiterplatte ist mit elektrostatisch gefährdeten Bauteilen bestückt. Vermeiden Sie deshalb eine direkte Berührung.



VORSICHT! Führen Sie die Installation nur im spannungsfreien Zustand aus. Sonst könnte die RAN-Schnittstelle beschädigt werden.

Montage

Die RAN-Schnittstelle mit den beiden Befestigungsclips auf eine Hutschiene aufklipsen, die sich z.B. in der medizinischen Versorgungseinheit befindet.

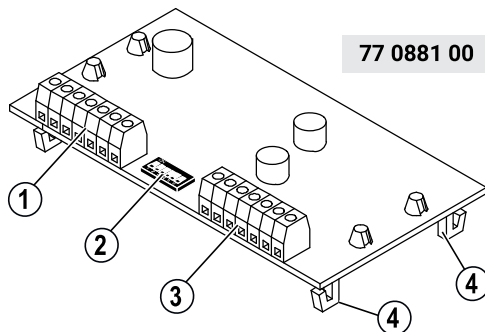

- [1] Anschlussklemme für Zimmerbus (RAN)
- [2] DIP-Schalter
- [3] Anschlussklemme für Fremdsystem
- [4] Zwei Befestigungsclips für Montage auf eine Hutschiene

DIP-Schalter einstellen




DIP-Schalter 1–3:

Bett-Nummer einstellen:

ON



Bett 1

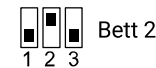

Bett 2



Bett 3



Bett 4



Bett 5



Bett 6

DIP-Schalter 4:


Kontaktart der angeschlossenen Ruftaste:



Schließer (NO)

DIP-Schalter 5–6:

ON

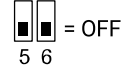

5 6

RAN interface for external call device, Order no. 77 0881 00

Intended Use

The RAN interface is used to connect the call function of a patient operating device from a third-party manufacturer to the RAN room bus of a nurse call system from the Flamenco system family.

Use of a patient operating device only after approval by Tunstall GmbH.

Dimensions (HxWxD): 13 x 51 x 95 mm (without fastening clips)

Weight: 28 g (without fastening clips)



NOTE! The complete installation of the system is described in the Technical Manual.




CAUTION! The printed circuit board includes electrostatic sensitive components. Avoid touching.



CAUTION! Only carry out the installation in a de-energised state. Otherwise the RAN interface could be damaged.

Mounting

Clip the RAN interface with the two fastening clips onto a top-hat rail, e.g. in the medical supply unit.

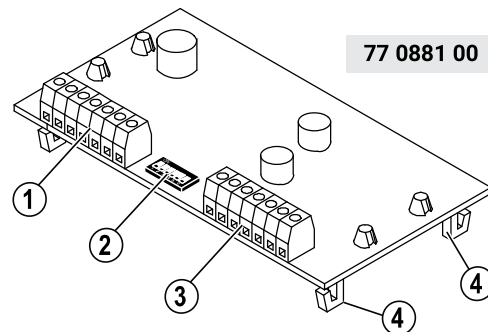

- [1] Connection terminal for RAN room bus
- [2] DIP switch
- [3] Connection terminal for external system
- [4] Two fastening clips for mounting on a top-hat rail

Setting the DIP switch




DIP switches 1–3:

Set the bed number:

ON



Bed 1

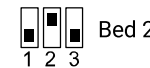

Bed 2



Bed 3



Bed 4



Bed 5



Bed 6

DIP switch 4:


Contact type of the connected call button:



Normally open contact (NO)

DIP switch 5–6:

ON

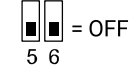

5 6

Anschlussplan

Connection Diagram

