




Regelmäßige Aktivität

Drücken Sie täglich zu folgenden Zeiten die Taste mit dem **gelben** Haus:



Notruf auslösen

Drücken Sie die **rote** Ruftaste an dem Lifeline Digital oder an dem Funksender MyAmie.

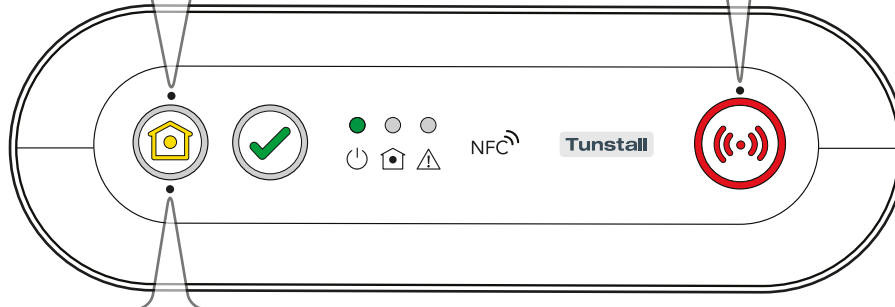

Abmelden

Bevor Sie die Wohnung verlassen:
Drücken Sie die Taste mit dem gelben Haus (3 Sekunden), bis eine Tonfolge erklingt.
Ansage: „Sie haben sich abwesend gemeldet.“
Während Sie abwesend sind, leuchtet die Taste dauerhaft **gelb**.

Anmelden

Wenn Sie in die Wohnung zurückkehren:
Drücken Sie die gelb leuchtende Taste mit dem Haus (3 Sekunden), bis eine Tonfolge erklingt.
Ansage: „Sie haben sich anwesend gemeldet. Willkommen!“
Während Sie anwesend sind, darf die Taste nicht dauerhaft **gelb** leuchten.

Tunstall

Sicherheit mit dem Lifeline Digital




Regelmäßige Aktivität

Drücken Sie täglich zu folgenden Zeiten die Taste mit dem **gelben** Haus:



Notruf auslösen

Drücken Sie die **rote** Ruftaste an dem Lifeline Digital oder an dem Funksender MyAmie.

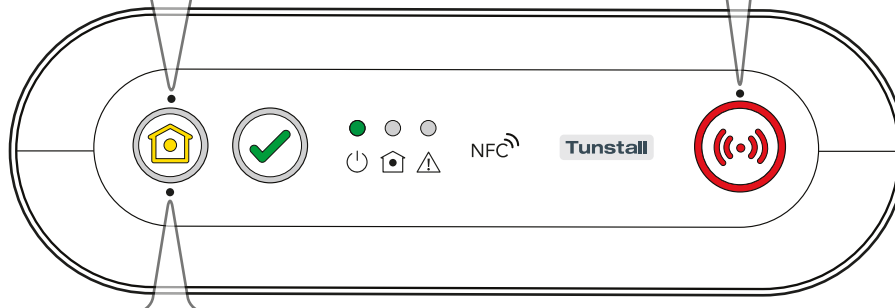

Abmelden

Bevor Sie die Wohnung verlassen:
Drücken Sie die Taste mit dem gelben Haus (3 Sekunden), bis eine Tonfolge erklingt.
Ansage: „Sie haben sich abwesend gemeldet.“
Während Sie abwesend sind, leuchtet die Taste dauerhaft **gelb**.

Anmelden

Wenn Sie in die Wohnung zurückkehren:
Drücken Sie die gelb leuchtende Taste mit dem Haus (3 Sekunden), bis eine Tonfolge erklingt.
Ansage: „Sie haben sich anwesend gemeldet. Willkommen!“
Während Sie anwesend sind, darf die Taste nicht dauerhaft **gelb** leuchten.

Tunstall

Sicherheit mit dem Lifeline Digital