




Regelmäßige Aktivität

Drücken Sie täglich zu folgenden Zeiten die Taste mit dem **gelben** Haus:



Notruf auslösen

Drücken Sie die **rote** Ruftaste an dem Lifeline Digital oder an dem Funksender MyAmie.

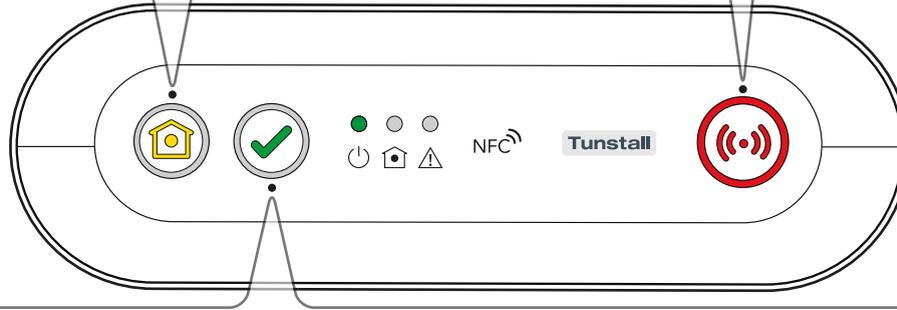

Abmelden

Bevor Sie die Wohnung verlassen:
Drücken Sie die Taste mit dem grünen Häkchen (3 Sekunden), bis eine Tonfolge erklingt. Ansage: „Sie haben sich abwesend gemeldet.“ Während Sie abwesend sind, leuchtet die Taste dauerhaft **grün**.

Anmelden

Wenn Sie in die Wohnung zurückkehren:
Drücken Sie die grün leuchtende Taste mit dem Häkchen (3 Sekunden), bis eine Tonfolge erklingt. Ansage: „Sie haben sich anwesend gemeldet. Willkommen!“ Während Sie anwesend sind, darf die Taste nicht dauerhaft **grün** leuchten.