



## Durchsage

1. **DURCHSAGE** antippen.

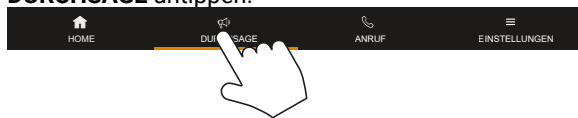


2. Mögliche Durchsage-Ziele werden angezeigt:

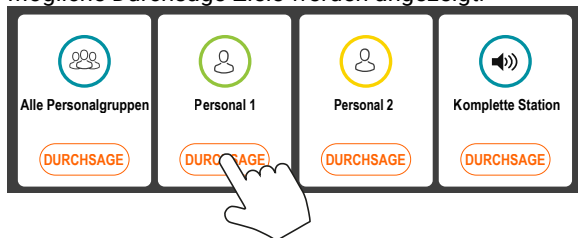


3. Bei gewünschtem Ziel **DURCHSAGE** antippen.
4. Die Sprechverbindung wird hergestellt.
5. Sprechen Sie die Durchsage.
6. Zum Beenden der Durchsage **ENDE** antippen.

## Anrufen


1. **ANRUF** antippen.

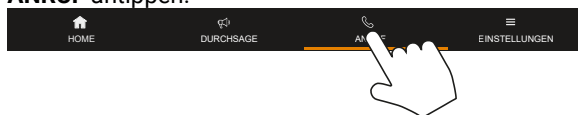

2. Mögliche Anruf-Ziele werden angezeigt:

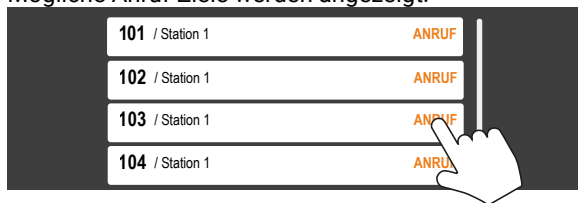


3. Bei gewünschtem Ziel **ANRUF** antippen.
4. Die Sprechverbindung wird hergestellt.

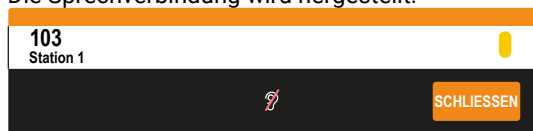


5. Sprechen Sie die Person am anderen Ende an. HINWEIS! Wenn die Mithörsperre am anderen Ende eingeschaltet ist, bitten Sie die Person eine Ruftaste zu drücken, um die Mithörsperre aufzuheben.
6. Zum Beenden des Gesprächs **SCHLIESSEN** antippen.

## Stationszusammenschaltung

1. **EINSTELLUNGEN** antippen.

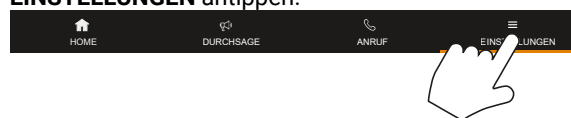

2. **Stationszusammenschaltung** antippen.

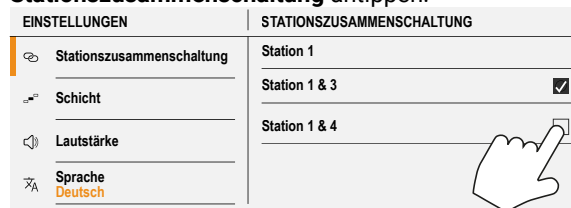

3. Gewünschte Stationszusammenschaltung antippen.
4. Zum Beenden des Vorgangs **HOME** antippen.




Diese Station ist mit anderen zusammengeschaltet.




## Schichtbetrieb

1. **EINSTELLUNGEN** antippen.

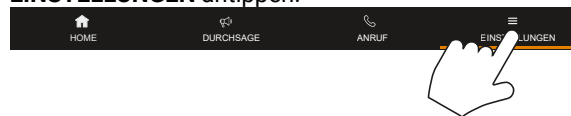


2. **Schicht** antippen.

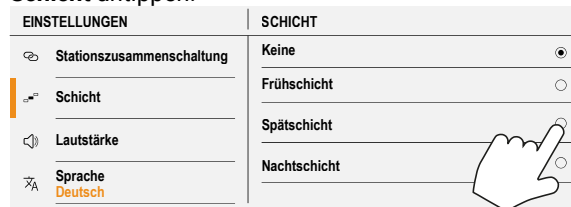

3. Gewünschte Schicht antippen.
4. Zum Beenden des Vorgangs **HOME** antippen.



Diese Station arbeitet im Schichtbetrieb.

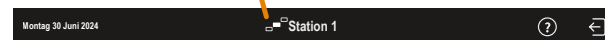

**Tunstall**



## Kurzanleitung

ComStation IP

Artikel-Nr. 76060650



Lesen Sie auch die ausführliche Gebrauchsanweisung. Hierzu auf das Fragezeichen in der Kopfzeile tippen oder das PDF über QR-Code herunterladen.




**Störung in der Rufanlage!** Wenn dieses Symbol in der Kopfzeile erscheint, sofort technisches Personal informieren.

## Home-Bildschirm

- Zum Starten der ComStation IP **ANMELDEN** im Anmeldebildschirm antippen.

Der Home-Bildschirm erscheint und zeigt die Rufe und Personal-Anwesenheiten Ihrer Station an:

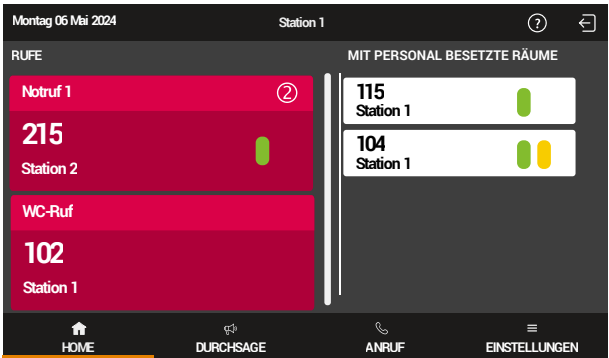

Abmelden! Wenn Sie die ComStation IP verlassen, melden Sie sich ab.

## Rufanzeige

Alarm	
115 Station 1	
Notruf 1	
107 Station 1	
Ruf	
101 Station 1	

**Alarmrufe:**  
Blau blinkt sehr schnell.  
Sehr schnelle Tonfolge.

**Notrufe:**  
Rot blinkt schnell.  
Schnelle Tonfolge.

**Rufe:**  
Rot blinkt langsam.  
Langsame Tonfolge.

Serviceruf	
109 Station 1	
Tür-Ruf	
100 Tür Station 1	

**Ausnahmen:**  
Grau blinkt langsam.  
Langsame Tonfolge.

### Mehrere Rufe in einem Zimmer

Notruf 1	
107 Station 1	


**Anzahl Rufe im Zimmer**  
Angabe nur bei mehr als einem Ruf.

## Ruf abfragen

1. Den Ruf antippen.



Eine Sprechverbindung zum Rufort wird hergestellt.

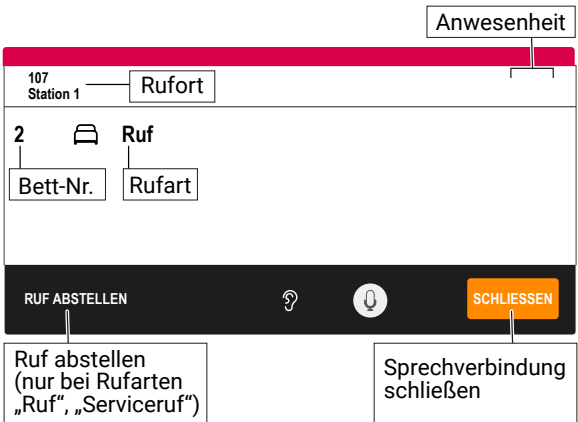

2. Sprechen Sie den Rufenden an und klären Sie, welche Hilfe nötig ist.
3. Zum Schließen der Sprechverbindung **SCHLIESSEN** antippen.  
Die Sprechverbindung wird geschlossen. Der Ruf wird als abgefragter Ruf angezeigt.
4. Organisieren Sie die benötigte Hilfe.
5. Die Rufbearbeitung ist abgeschlossen, wenn der Ruf am Rufort oder von der ComStation IP über **RUF ABSTELLEN** abgestellt wurde.

## Abgefragte Rufe

Solange ein abgefragter Ruf nicht abgestellt ist, wird er als abgefragter Ruf angezeigt.

Ruf	
101 Station 1	

**Frische Rufe blinken.**  
Ganze Anzeige ist farbig.  
Rufton als Tonfolge.

Ruf	
101 Station 1	

**Abgefragte Rufe blinken nicht.**  
Nur Titelbalken ist farbig.  
Kein Rufton.

## Personal ansprechen

- Eintrag in der Liste der Personal-Anwesenheiten antippen.



Sprechverbindung zum Personal wird hergestellt.



## Zustand von Sprechverbindungen

	<b>Mithörsperre im Zimmer</b> Sie können nicht hören, was im Zimmer gesagt wird.
	<b>Keine Mithörsperre im Zimmer</b> Sie können hören, was im Zimmer gesagt wird.
	<b>Ihr Mikrofon ist eingeschaltet</b> Die Person im Zimmer kann Sie hören.
	<b>Ihr Mikrofon ist ausgeschaltet</b> Die Person im Zimmer kann Sie nicht hören.
	<b>Lautstärke lauter</b> durch Tippen auf das Symbol.
	<b>Lautstärke leiser</b> durch Tippen auf das Symbol.