

Daten von CareAssist zu CareAssist Klonen

Der CareAssist (Art.Nr.: 68108/01-F1) kann die Daten zu einem anderen CareAssist übertragen mit der beschriebenen Funktion.

Erforderliches Zubehör:

1. 2x CareAssist Einheiten (1x Host, 1x Zielgerät)

Beide Einheiten müssen dieselbe Softwareversion haben.
Das Zielgerät muss sich in den Werkseinstellungen befinden.

2. Das spezielle Downloadkabel ist zu verwenden:





Art.Nr.: 68108/0101

Funktion aktivieren:

1. Drücken und halten Sie die  „Select“-Taste auf der Host CareAssist Einheit, um das Menü zu öffnen. Das Display zeigt die Meldung: „Sender hinzufügen“ an.
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten  und wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ erreichen.
3. Drücken Sie nun die  „Select“-Taste. Das Display zeigt „Alarmierung“ an.
4. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten  und wählen Sie Service-Menü.
5. Drücken Sie die  „Linke“ und „Rechte“ Taste gleichzeitig und halten Sie diese gedrückt.
- Drücken Sie die  „Select“-Taste und geben Sie die Datenübertragung frei.
Das Display zeigt „Pager“ an.
6. Drücken Sie anschließend die Pfeiltaste nach unten  und wählen Sie „Gerät klonen“ aus.
7. Bestätigen Sie die Auswahl mit der  „Select“-Taste.
Im Display kommt die Meldung: „Ziel anschließen CareAssist Gerät.“
8. Verbinden Sie den Host mit dem Zielgerät mit dem Downloadkabel.
Auf dem Zielgerät ist keine Aktion nötig.
Der Host fragt: „Klonen ausführen?“
Der Vorgang ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu bestätigen.



9. Drücken Sie die  „Rechte“ Taste für „Ja“ und bestätigen Sie die Aktion mit der  „Select“-Taste.

Das Host-Display zeigt: „Initialisiere Ziel.“

„Klonen Erfolgreich.“

Während des Vorgangs zeigt das Zielgerät: „Klon Modus“ an.

Anschließend startet das Zielgerät neu.

Damit ist der Klon Vorgang abgeschlossen.