

Sicherheit mit dem Lifeline GSM

Abmelden


Bevor Sie die Wohnung für mehr als 12 Stunden verlassen, die **blaue Funktionstaste** drücken.

Während Sie abgemeldet sind, leuchtet die kleine Statusanzeige gelb.

Anmelden

Wenn Sie in die Wohnung zurückkehren, die **blaue Funktionstaste** drücken.

Wenn Sie anwesend sind, darf die kleine Statusanzeige nicht dauerhaft gelb leuchten.

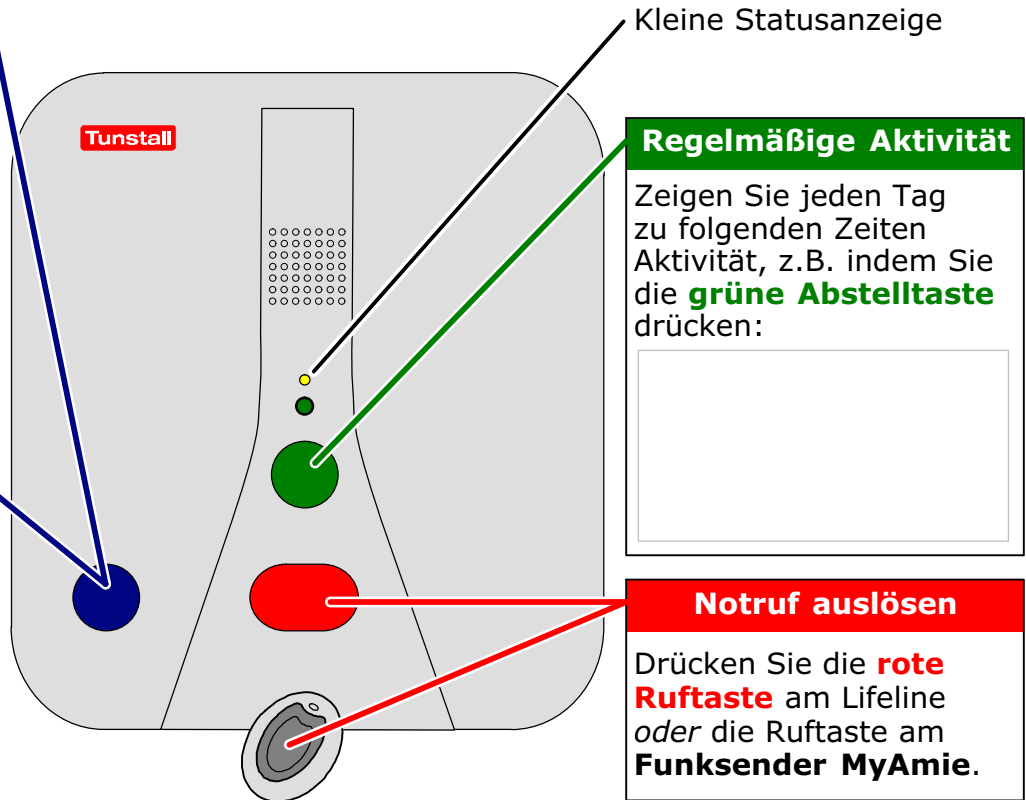

Kleine Statusanzeige

Regelmäßige Aktivität

Zeigen Sie jeden Tag zu folgenden Zeiten Aktivität, z.B. indem Sie die **grüne Abstelltaste** drücken:

Notruf auslösen

Drücken Sie die **rote Ruftaste** am Lifeline oder die Ruftaste am **Funksender MyAmie**.