


Tunstall

Sicherheit mit Lifeline

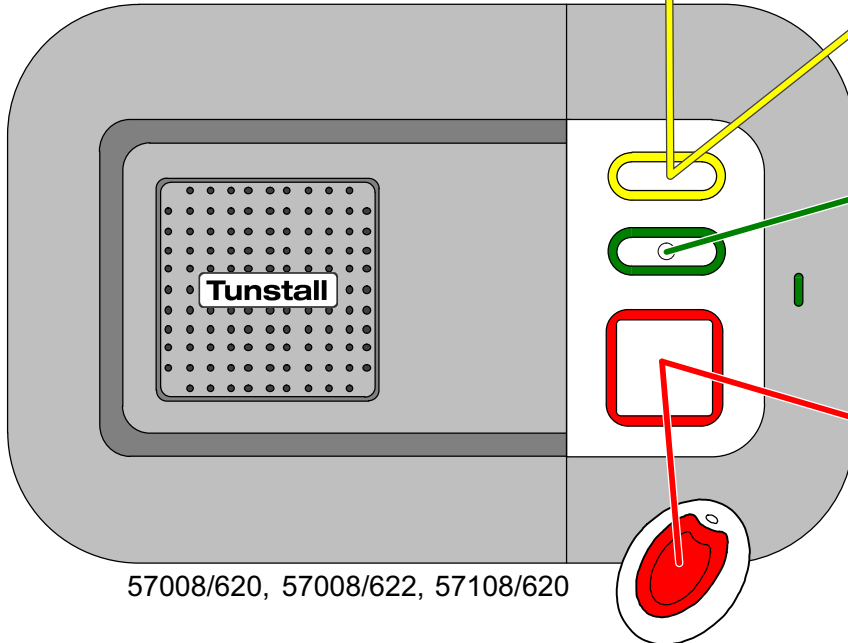

57008/620, 57008/622, 57108/620

Abmelden

Bevor Sie die Wohnung länger als 12 Stunden verlassen, drücken Sie die **gelbe** Taste. Während Sie abgemeldet sind, leuchtet die gelbe Taste.

Anmelden

Wenn Sie in die Wohnung zurückkehren, drücken Sie die **gelbe** Taste. Wenn Sie anwesend sind, darf die gelbe Taste nicht leuchten.

Regelmäßige Aktivität

Zeigen Sie täglich zu folgenden Zeiten Aktivität, z.B. indem Sie die **grüne** Taste drücken:

Notruf auslösen

Drücken Sie die **rote** Ruftaste an dem Lifeline *oder* die Ruftaste an dem Funksender MyAmie.