


ComStation IP

76060650

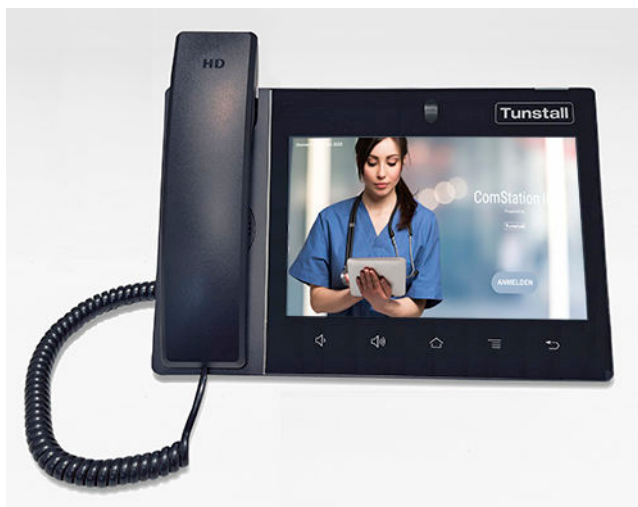

Allgemeine Beschreibung

Die ComStation IP ist eine Stationsabfrage für den Dienststützpunkt, geeignet zur Abfrage und Bearbeitung von Rufen und zur Unterstützung der Pflegeorganisation.

Die ComStation IP basiert auf einem IP-Tischtelefon mit angepasstem Android-Betriebssystem. Die Funktion als ComStation ist als Applikation auf dem IP-Telefon vorinstalliert und arbeitet immer im Vordergrund.

Die Bedienung erfolgt über ein großes Touchdisplay mit 8-Zoll-Bildschirmdiagonale.

VoIP-Sprachübertragung sorgt für eine exzellente Sprachqualität und Verständlichkeit in allen Betriebsarten.

Durch die Möglichkeiten der Stationszusammenschaltung und den Betrieb nach vordefinierten Schichten unterstützt die ComStation IP die Pflegeorganisation. Als IP-Endgerät kann das Gerät auch ortsflexibel eingesetzt werden.

Ausstattung

- ComStation-App auf IP-Tischtelefon mit angepasstem Android-Betriebssystem
- 8" (1280 × 800) kapazitives 10-Punkt-Touchdisplay mit IPS-LCD
- Tischaufstellung

- Optional Wandmontage über separat zu erwerbende Wandhalterung möglich (Artikel-Nr. 76060660)
- Spannungsversorgung über PoE oder mitgeliefertes Steckernetzteil
- App-Hilfe

Funktionen

- **Rufbearbeitung:**
 - Anzeige von allen Rufen und Anwesenheiten der angeschlossenen Station (Ausnahmen nur bei Stationszusammenschaltung oder Schichtbetrieb, siehe unten)
 - Anzeige von Rufen in einer Liste, geordnet nach Priorität gemäß Definition der Rufanlage. Der Ruf der höchsten Priorität steht oben.
 - Anzeige von Anwesenheiten in einer Liste in chronologischer Reihenfolge. Die älteste Meldung steht oben.
 - Unterscheidung der Rufklassen (Rufe, Notrufe, Alarmrufe) durch Blinkfolge und Farben
 - Zusätzlich akustische Unterscheidung der Rufklassen durch Tonfolge
 - Unterscheidung von frischen und abgefragten Rufen
 - Bei Rufabfrage Angabe von Rufart, Rufort, Bettenkennung
 - Sprechverbindung zum Raum oder zum Bett abhängig vom Rufgerät
 - Kontaktaufnahme zu Personal durch Herstellen der Sprechverbindung zu einem Raum mit eingeschalteter Anwesenheit
- **Sprechverbindungen:**
 - Freisprechen oder diskretes Sprechen über Handhörer
 - Anzeige des Zustands der Sprechverbindung: Mithörsperre (privat) im Zimmer ein/aus, Mithörsperre (stumm) an der ComStation ein/aus
- **Durchsagen:**
 - Durchsage an alle Räume und Flure der Station
 - Durchsage an alle Räume der Station mit eingeschalteter Anwesenheit von Personal 1, Personal 2 oder unabhängig von der Personalgruppe

- **Anrufen:**
 - Räume der angeschlossenen Station anrufen
 - Andere ComStation auf der Station anrufen
 - Bei Stationszusammenschaltung zusätzlich Anrufen der ComStations der zusammengeschalteten Stationen
 - ManagementCenter (wenn vorhanden) anrufen
- **Stationszusammenschaltung:**
Eine Stationszusammenschaltung sind mehrere Stationen, innerhalb deren Rufe nachgesendet und an den ComStations angezeigt werden. Aktivierbare Stationszusammenschaltungen müssen mit der Konfigurationssoftware SystemOrganizer vordefiniert werden.
 - Bei Stationszusammenschaltung Anzeige von allen Rufen und Anwesenheiten der zusammengeschalteten Stationen
 - Stationszusammenschaltung aktivieren durch Auswahl aus der Liste von vordefinierten Stationszusammenschaltungen
 - Stationszusammenschaltung deaktivieren
- **Schichtbetrieb:**
Eine Zone ist ein Teil der Station, innerhalb dessen Rufe nachgesendet und an der ComStation angezeigt werden. Die Einteilung in Zonen kann wechseln. Jede Einteilung der Station in Zonen wird als „Schicht“ bezeichnet. Aktivierbare Schichten müssen mit der Konfigurationssoftware SystemOrganizer vordefiniert werden. Zonen können sich überschneiden, d.h. eine ComStation kann mehreren Zonen angehören.
 - Bei Schichtbetrieb Anzeige von allen Rufen und Anwesenheiten der Zone, zu der diese ComStation zugeordnet ist.
 - Schicht aktivieren durch Auswahl aus der Liste von vordefinierten Schichten
 - Schicht deaktivieren
- **Systemsicherheit durch Störungssignalisierung:**
 - Anzeige von Störungen der Rufanlage auf der Station
 - Anzeige, wenn die Verbindung zwischen der ComStation und der Rufanlage unterbrochen ist

Schnittstellen

- Anschluss über Standard-Patchkabel an das IP-Netzwerk der Rufanlage
- Mitgeliefertes Steckernetzteil muss an 230-V-AC-Steckdose (100 – 240 V AC) angeschlossen werden, wenn Spannungsversorgung nicht über PoE erfolgt
- Headset

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT):	ca. 160 x 260 x 155 mm (inkl. Handhörer, aufgestellt auf Standfuß)
Gewicht:	1450 g
Material von Gehäuse und Handhörer:	ABS
Touchscreen-Oberfläche:	Chemisch gehärtetes Sicherheitsglas
Material des Spiralkabels:	Weich-PVC
Spannungsversorgung:	über PoE/PoE+ oder mitgeliefertes Steckernetzteil
Steckernetzteil, Eingang:	100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme PoE:	bis zu ca. 12,5 W
Leistungsaufnahme über Steckernetzteil:	Nennleistung max. 18 W
Umgebungstemperatur Betrieb:	0 °C bis +40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung/Transport:	-10 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)

Artikel-Nr.	Produktname	Hinweis
76060650	ComStation IP	Nachfolgemodell zu ComStation IP, Artikel-Nr. 76060550.
Optionales Zubehör:		
76060660	ComStation IP Wandhalterung	siehe Anhang „Zubehör“

Zubehör zu Abfragestellen

Systemrechner

80 6010 00D

Systemrechner zur Steuerung eines ManagementCenters^{PC}, ManagementCenters^{SE} oder zum Betrieb autark arbeitender Softwareanwendungen.

Die Ausführung entspricht der jeweils zur Lieferung vorliegenden Standard-Ausstattung. Weitere Details auf Anfrage.

LCD-Monitor

80 6049 00

Die Ausführung entspricht der jeweils zur Lieferung vorliegenden Standard-Ausstattung. Weitere Details auf Anfrage.

ComStation IP Wandhalterung

76060660

Halterung zur Wandmontage einer ComStation IP, Artikel-Nr. 76060650, oder einer ComStation SE IP, Artikel-Nr. 78060650.

- Material: ABS
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (HxBxT): ca. 135 x 150 x 55 mm



RJ45 Aufputz-Anschlussdose (2-fach)

00 0280 39

Aufputz-Anschlussdose mit zwei 8-poligen RJ45-Buchsen, LSA-Anschlüsse. Max. 10 GBit/s, max. 90 W bei PoE zulässig.

Geeignet z.B. für Flurdisplay IP Alpha 16 (76 0150 00), Flurdisplay IP Alpha 16, doppelseitig (76 0160 00), ComStation IP (76 0605 50), ComStation SE IP (78 0606 50).

- Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
- Steckrichtung 45° nach unten geneigt
- Abmessungen (HxBxT): 85 x 85 x 43 mm

