


Zugtaster-Einsatz

exkl. Rahmen

29 0707 20F

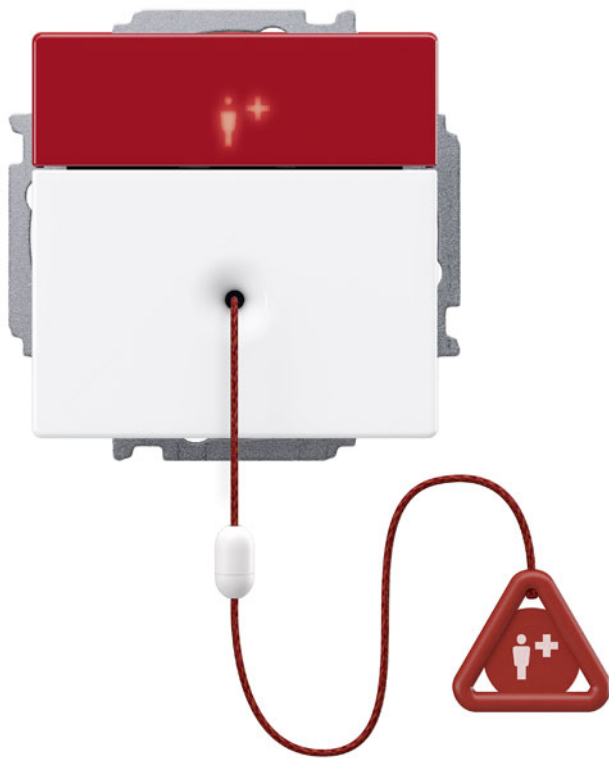

Allgemeine Beschreibung

Taster-Einsatz mit einer Zugschnur, an deren Ende ein Rufgriff befestigt ist, zum Auslösen von Rufen oder WC-Rufen durch Zugbetätigung. Als weitere Rufmöglichkeit dient eine rote Ruftaste mit Beruhigungslicht.

Eignet sich insbesondere zur Rufauslösung in Dusche oder am WC.

Das Beruhigungslicht leuchtet hell, sobald ein Ruf ausgelöst wird. Wenn bei Rufauslösung die Anwesenheit im Raum eingeschaltet ist, wird ein Notruf ausgelöst.

Abstellfunktion für WC-Rufe optional konfigurierbar.

Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Ausstattung und Funktionen


- 2,50 m lange Zugschnur inkl. Rufgriff mit Symbol und Sicherheitsverschluss
- Sicherheitsverschluss in der Zugschnur öffnet sich, wenn die Zugkraft einen Grenzwert von ca. 25 Nm überschreitet (Strangulationsschutz). Durch einfaches Zusammenstecken wird der Sicherheitsverschluss wieder geschlossen.
- Rote Ruftaste mit Beruhigungslicht und integriertem Findelicht
- Akustische Rückmeldung bei Rufauslösung
- Wahlweise verwendbar für Ruf (Werkseinstellung) oder WC-Ruf
- Der Zugtaster kann so konfiguriert werden, dass mit der Zugschnur WC-Rufe nicht nur ausgelöst sondern bei eingeschalteter Anwesenheit auch abgestellt werden können (Funktion verfügbar ab Produktionswoche 24/2021). Zur Einhaltung der DIN VDE 0834 ist ein zusätzlicher Abstelltaster zu installieren.
- An dem Zugtaster kann eine Kanalnummer eingestellt werden, um den Rufort im Raum näher zu bestimmen. Die Kanalnummer kann z.B. Betten oder WC-Kabinen kennzeichnen.
- Standardmäßig auf Kanal 0 programmiert
- Durch Designmerkmale als Bestandteil der Rufanlage erkennbar
- Einfache Plug-und-Play-Montage
- Wandmontage oder Deckenmontage in 1-teilige Einbaudose
- Montage in Einfachrahmen
- Integrierte Elektronik mit 3-poligem Steckanschluss für den Zimmerbus (RAN)

Zugtaster-Einsatz

exkl. Rahmen

29 0707 20F

- Seite 2 -

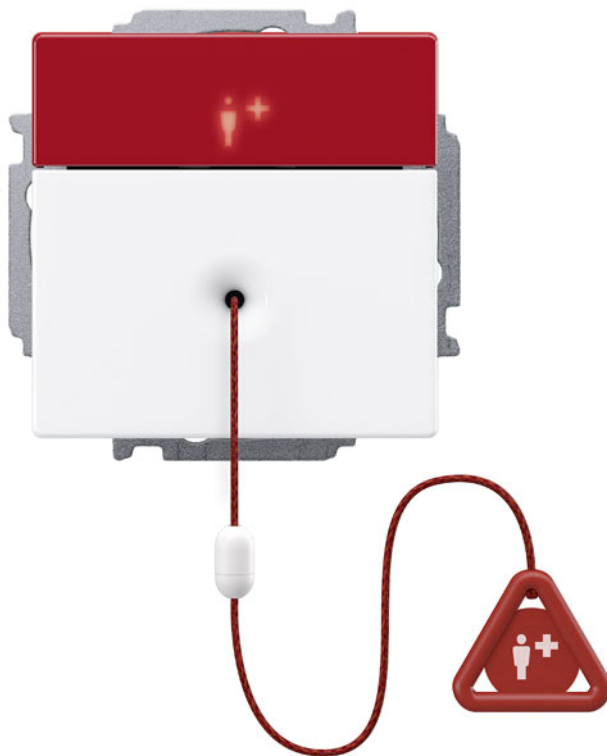

Lieferumfang

- Zugtaster-Einsatz
- Tragring
- Klemmenblock, 5-polig, schwarz/gelb/rot/hellgrau/dunkelgrau, gesteckt
- Installationsanleitung

Technische Daten

Nennspannung:	24 V DC
Ruhestromaufnahme:	9 mA
Schutzart:	IP22
Abmessungen (HxB):	71 x 71 mm
Einbautiefe:	24 mm
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Material Zugschnur:	Polyamid
Material Rufgriff:	ABS
Umgebungstemperatur:	+5 °C – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	0 % – 95 %

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
29 0707 20F	Zugtaster-Einsatz	Design future® linear
Rahmen, separat bestellen:		
77 0210 51	Rahmen A, 1-fach	
77 0210 52	Rahmen C, 1-fach	
77 0210 53	Rahmen F, 1-fach	
Erforderliches Zubehör, separat bestellen:		
17 0100 00	Einbaudose Mauerwerk, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
17 5100 00	Einbaudose Hohlwand, 1-teilig	siehe Anhang „Zubehör“
Ersatzteile, bei Bedarf nachbestellen:		
19 9500 19	Klemmenblock, 5-polig, sw/ge/rt/gr/gr	siehe Anhang „Zubehör“
77 9510 06	Zugschnur inkl. Rufgriff, Sicherheitsverschluss	siehe Anhang „Zubehör“