



Warnung

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasierendes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Kenntnis über den Inhalt der vollständigen **VarioRec6**-Anleitung LE243, verfügbar auf www.lehmannweb.de.

Hinweis: In dieser Übersicht wird der „**VarioRec6** Funkempfänger“, abgekürzt als „Funkempfänger“ oder „Empfänger“ bezeichnet. In dieser Kurzanleitung sind nur die wesentlichen Funktionen - ohne mögliche Störfälle - beschrieben.

Funkempfänger in Betrieb nehmen und Funkruf empfangen

1 Empfänger einstecken

Bei Netzteilversion

2 Empfänger ist betriebsbereit
grün

3 Funkruf auslösen
(Sender bereits eingelernt)

4 Empfänger meldet und leitet den Ruf weiter
1,5 s rot

Einen Funksender einlernen

Damit ein Funksender vom Rufempfänger erkannt wird, muss dieser am Funkempfänger eingelernt werden.

1 Beim Einstecken die rechte Taste gedrückt halten

Bei Netzteilversion*

2 Blinklicht grün
Empfänger ist im Lernmodus

3 Funkruf auslösen

4 Blinklicht grün- / orange
Der neue Funksender wurde erkannt

5 Rechte Taste kurz drücken

6 1,5 s grün
Der neue Funksender ist eingelernt

7 Linke Taste lang drücken

8 grün
Empfänger ist wieder betriebsbereit

*Version mit externer Spannungsversorgung bei gedrückter rechter Taste Steckernetzteil einstecken.

Einen Funksender auslernen

Damit ein Funksender vom Funkempfänger nicht mehr erkannt wird, muss dieser am Funkempfänger wieder ausgelernt werden.

1 Bei Netzteilversion
Beim Einstecken die rechte Taste gedrückt halten

2 Blinklicht grün
Empfänger ist im Lernmodus

3 Am auszulernenden Funksender Funkruf auslösen

4 Blinklicht grün / rot
Der Funksender wurde erkannt

5 Rechte Taste kurz drücken

6 1,5 s rot
Der Funksender ist ausgelernt

7 Linke Taste lang drücken

8 grün
Empfänger ist wieder betriebsbereit

Meldungen des Funkempfängers

Wichtig: Diese Meldungen treten nur im Betriebszustand auf und weisen auf eine Störung / Fehler hin. Zum Löschen wird quittiert. Detailinformationen zur jeweiligen Meldung unbedingt in der vollständigen Anleitung LE 243 nachsehen.

Meldung	Anzeige	Maßnahme*	Meldung quittieren
Senderbatterie schwach	Blinklicht rot	Im Funksender die Batterie wechseln	1 linke oder rechte Taste drücken
Tagesmeldung fehlt	Blinklicht grün	Funksender überprüfen	
Vitalmeldung fehlt	Blinklicht grün/orange	Ursache der Nicht-Auslösung klären	
Empfangsblockade (nur bei Sozialalarmfrequenz)	Blinklicht orange	Funkstörer in der Umgebung suchen	
Systemfehler	Blinklicht grün/rot	Fehler im Funkempfänger oder der Anschaltung	Die Meldung ist gelöscht
Statischer Ruf	Statisch rot	Am Funkempfänger zurückstellen	2 grün