



Warnung

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasierendes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Kenntnis über den Inhalt der **vollständigen VarioRec6 U-Anleitung LE265¹**.


Hinweis: In dieser Übersicht wird der „VarioRec6 U Funkempfänger“, abgekürzt auch als „Funkempfänger“ oder „Empfänger“ bezeichnet.

Verwendung

In dieser Kurzanleitung sind nur die wesentlichen Funktionen - ohne mögliche Störfälle - beschrieben.

Einen Funksender einlernen

Damit ein Funksender vom Rufempfänger erkannt wird, muss dieser am Funkempfänger eingelernt werden.

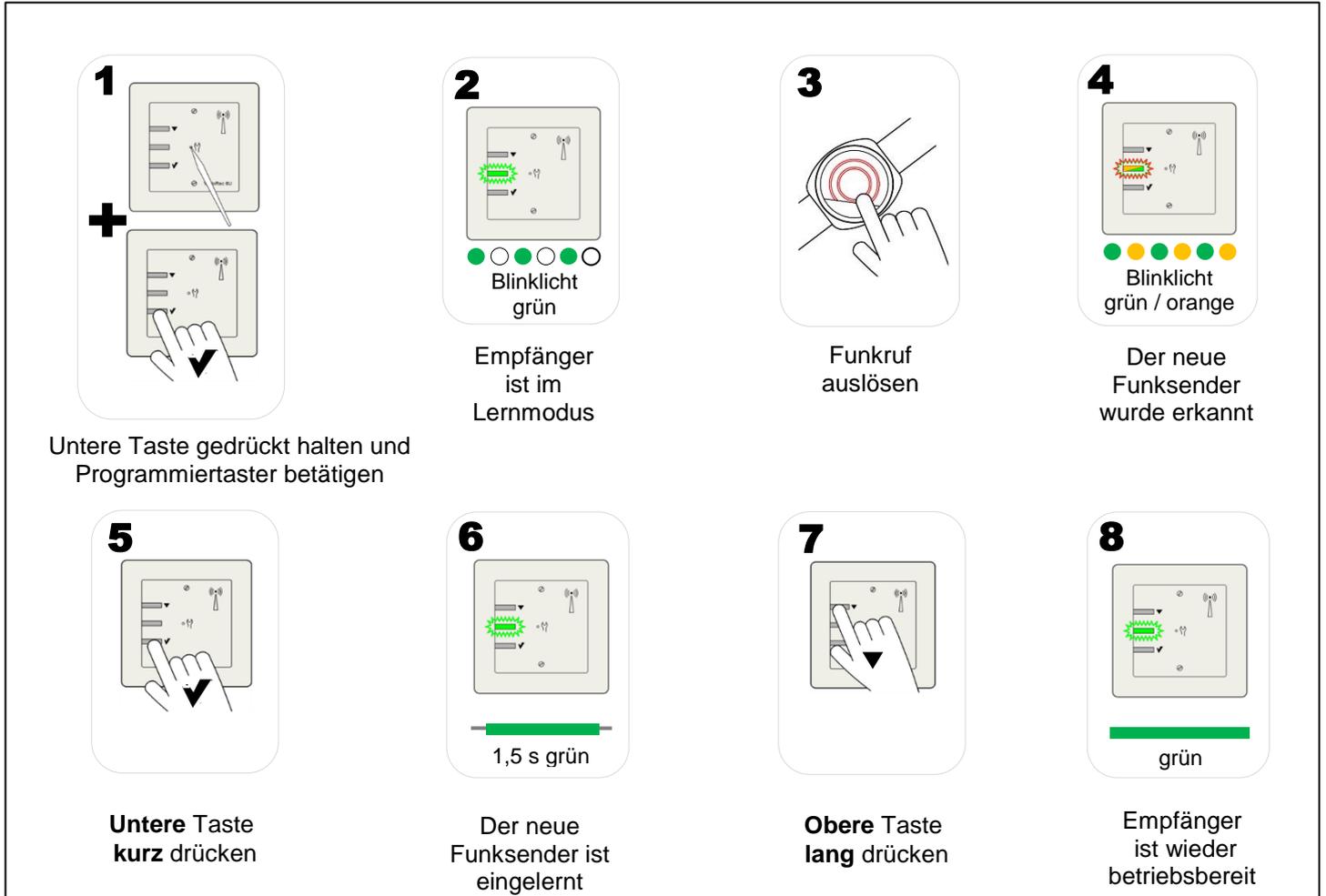

1 Untere Taste gedrückt halten und Programmiertaster betätigen

2 Empfänger ist im Lernmodus
Blinklicht grün

3 Funkruf auslösen

4 Der neue Funksender wurde erkannt
Blinklicht grün / orange

5 Untere Taste kurz drücken


6 Der neue Funksender ist eingelernt
1,5 s grün

7 Obere Taste lang drücken

8 Empfänger ist wieder betriebsbereit
grün


¹Die vollständige Bedienungsanleitung **VarioRec6 U/V** (LE265) ist auf der Webseite www.lehmannweb.de hinterlegt

Elektrischer Anschluss und Montage

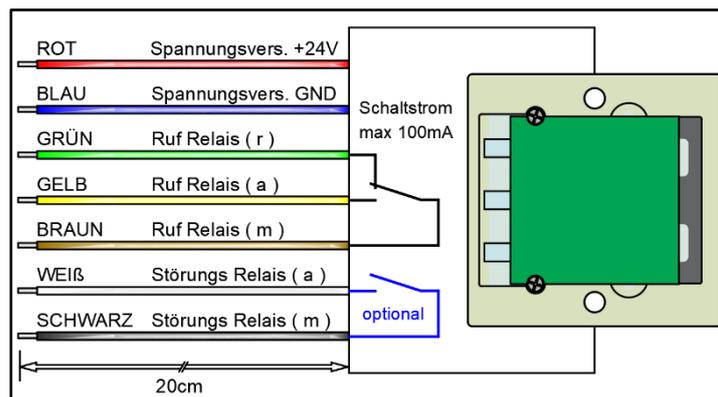

Einen Funksender auslernen

Damit ein Funksender vom Rufempfänger nicht mehr gemeldet wird, muss dieser am Funkempfänger wieder ausgelernt werden.

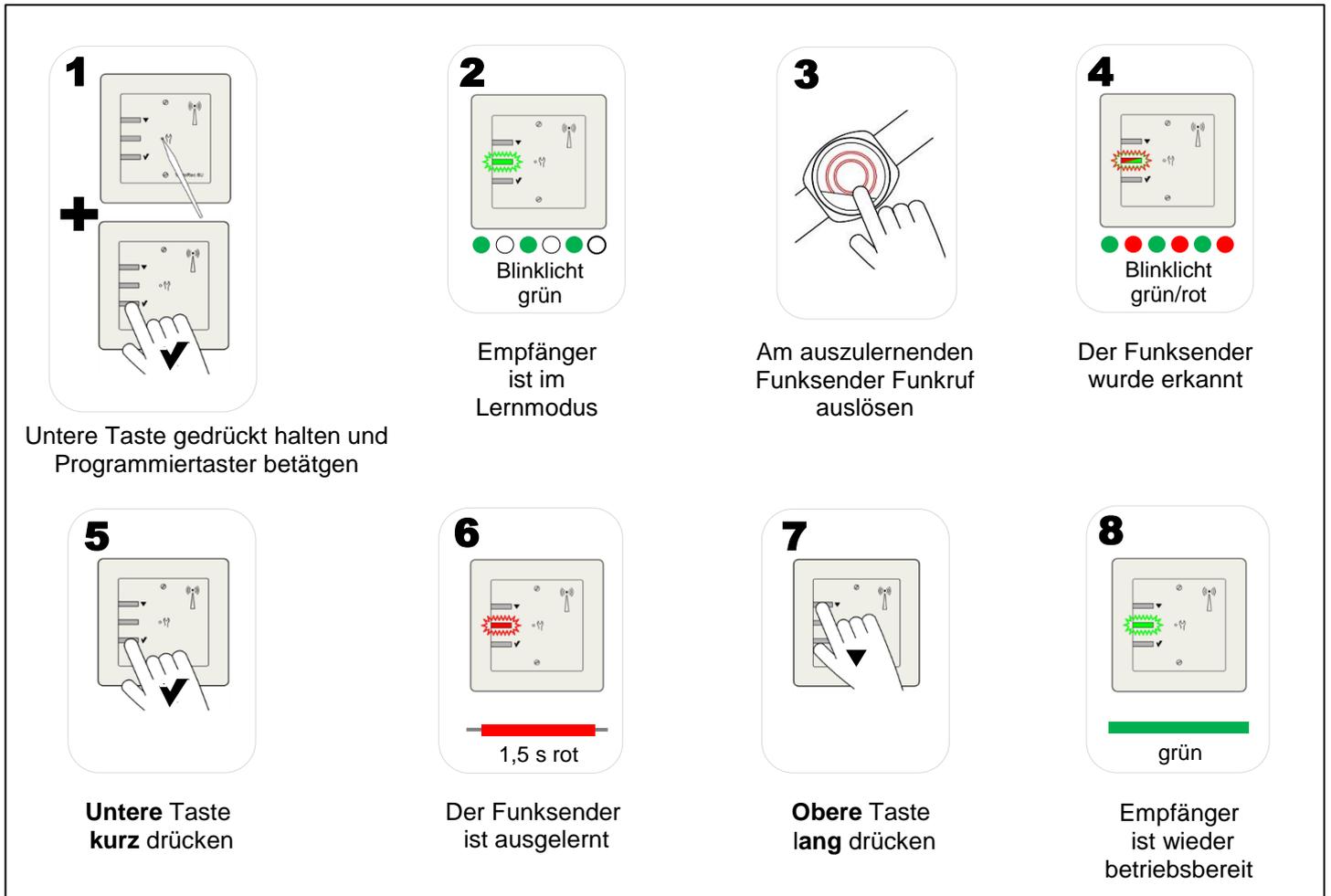

1 Untere Taste gedrückt halten und Programmierertaster betätigen

2 Empfänger ist im Lernmodus
Blinklicht grün

3 Am auszulernenden Funksender Funkruf auslösen

4 Der Funksender wurde erkannt
Blinklicht grün/rot

5 Untere Taste kurz drücken

6 Der Funksender ist ausgelernt
1,5 s rot

7 Obere Taste lang drücken

8 Empfänger ist wieder betriebsbereit
grün

Meldungen des Funkempfängers

Wichtig: Diese Meldungen treten nur im Betriebszustand auf und weisen auf eine Störung / Fehler hin. Zum Löschen wird quittiert. Detailinformationen zur jeweiligen Meldung unbedingt in der vollständigen Anleitung nachsehen.

Blinksequenz	Meldung	Maßnahme	Blink-Meldung quittieren	
 Blinklicht rot	Senderbatterie schwach	Beim Funksender die Batterie wechseln	<p>1</p>  <p>Untere oder obere Taste kurz drücken</p>	<p>2</p>  grün Die Meldung ist gelöscht Empfänger wieder betriebsbereit
 Blinklicht grün	Tagesmeldung fehlt	Funksender überprüfen		
 Blinklicht orange	Empfangsblockade (nur bei Sozialalarm-Frequenz)	Funkstörer in der Umgebung suchen		
 Blinklicht rot/grün	Systemfehler	Fehler im Funkempfänger		