



Warnung

Die Verwendung eines Rufgerätes entbindet nicht von der Aufsichtspflicht über die damit unterstützten Personen. Als funkbasiertes System ist es nicht zur Meldung von vorhersehbaren, lebensbedrohlichen Zuständen zugelassen.

Lieferumfang


Produkt	Bestellnummer ¹	Frequenz ¹
Funk-Blitzalarm-T	Z00820271	869,2125 MHz
Bedienungsanleitung	LE434	

¹Bestellnummer und Frequenz befinden sich auf dem Typenschild.

Typ: Überprüfen Sie nach dem Auspacken die Lieferung auf Vollständigkeit und auf Beschädigungen.

Bild 1: Funk-Blitzalarm-T

Bild 2: Beispiel Auswahl kompatibler Funk-Sender...

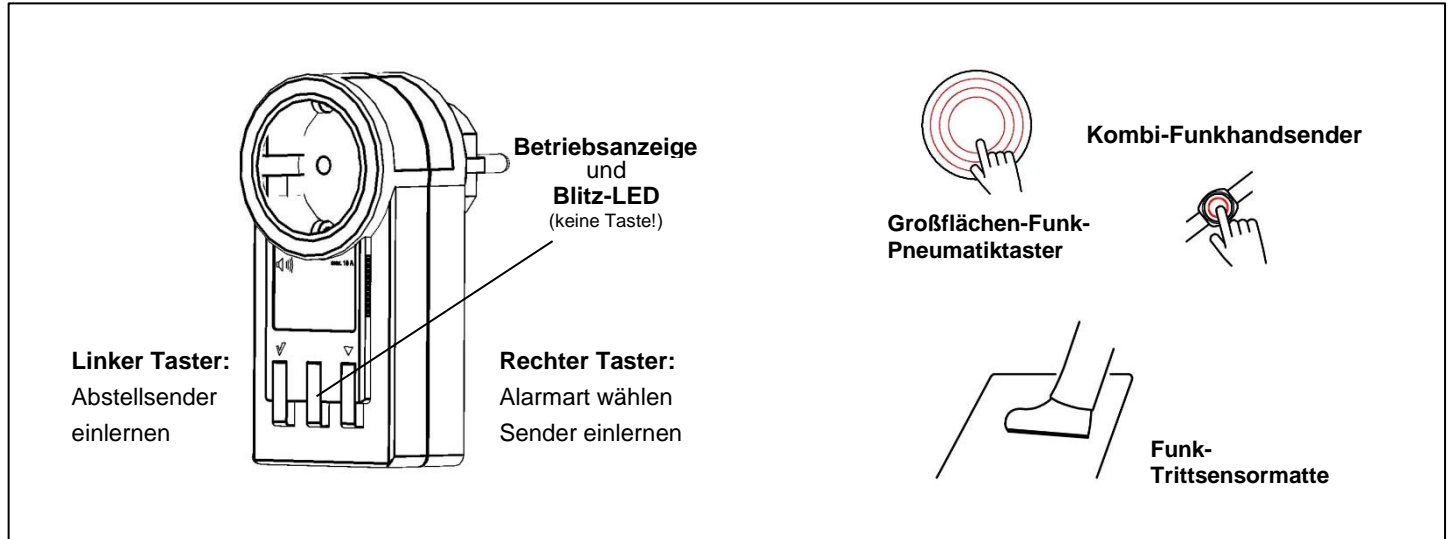

Verwendung und Funktion

Der Funk-Blitzalarm-T wird in eine 230 V Steckdose eingesteckt. Er meldet Rufe von kompatiblen und eingelernten Funk-Sendern über einen akustischen Signalgeber und/oder eine Blitzleuchte. Die Steckdose kann durch einen anderen Verbraucher weiterhin genutzt werden, die max. Schaltleistung von 10 A (2.300 W) darf in keinem Fall überschritten werden.

Inbetriebnahme:

Einlernen / Ablernen von Funksendern am Funk-Blitzalarm-T

Das zur Erstinbetriebnahme erforderliche „Einlernen“ ist in Bild 3 und eventuelle „Ablernen“ ist in Bild 6 beschrieben.

Sichere Reichweite der Funkverbindung prüfen

Die Reichweite der verwendeten Funksender entnehmen Sie der Dokumentation, die den Funksendern beiliegt. Die Reichweite hängt wesentlich von den örtlichen und baulichen Gegebenheiten ab.

Vor erstmaliger Verwendung sollte die störungsfreie Funkverbindung geprüft werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie alle in der näheren Umgebung befindlichen elektronischen Unterhaltungs- und Kommunikationsgeräte wie Fernseher, Spielekonsolen und Computer **ein**.
2. Prüfen Sie die Funkmeldung zum Funk-Blitzalarm-T in ca. 5–10 m Zusatzabstand gegenüber dem vorgesehenen Gebrauchsabstand. Achten Sie darauf, dass die Meldung mit einem einzigen Funksignal ausgelöst wird.

Einzulernende Sender

Sender werden üblicherweise als Rufsender eingelernt. Beispiele sind auf dieser Seite unter Bild 2 abgebildet. Diese befinden sich bei der zu pflegenden Person, die mit diesen einen Ruf sendet, der am Funk-Blitzalarm-T einen Ruf erzeugt.

Jeder Sender kann ebenfalls als Abstellsender eingelernt werden, wenn z.B. der Funk-Blitzalarm-T an einer schwer zugänglichen Stelle platziert werden muss. Dafür bietet sich der Hand- oder Umhängesender an, welcher beim Pflegepersonal verbleibt. Mit diesem kann der Ruf am Funk-Blitzalarm-T aus der Ferne abgestellt werden.

Reinigung

Empfohlen wird ein weicher, leicht feuchter Lappen mit etwas Spülmittel ggfs. mit Zusatz von Desinfektionsmittel gem. EN 16615. Auf keinen Fall scheuernde Reinigungsmittel verwenden.



Vorsicht

Vor Reinigung des Gerätes ist dieses von der Stromversorgung zu trennen. Die Steckereinheiten nicht feucht abwischen. Das Gerät ist erst wieder mit der Stromversorgung zu verbinden, wenn es vollständig getrocknet ist.

Regelmäßige Maßnahmen



Vorsicht

Die regelmäßigen Überprüfungen sorgfältig durchführen. Verschlossene / beschädigte Teile sofort austauschen. Bei Beschädigung oder Funktionsmangel das System bis zur Reparatur nicht mehr verwenden. Ein Öffnen des Gerätes ist nicht zulässig.

Maßnahmen

Vorgeschlagen wird eine wöchentliche Besichtigung mit Prüfruf-Auslösung unter Beobachtung der Signal-LED Meldung.

Technische Daten

Betriebsfrequenz:	869,2125 (sichere Sozialalarm-Frequenz)
Netzspannung:	230 V AC
Anzeigen:	Signal- und Blitz-LED für Alarm Ruf- und Batteriemeldung, interner akustischer Alarmgeber
Batterie-Überwachung:	„Batterie schwach“ Erkennung
Abmessungen:	50 x 110 x 40 mm (BxHxT)
Gewicht:	Ca. 130 g
Schutzart:	IP 30
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)

Bild 3: Alarm-Sender einlernen¹

Rechte Taste ca. 3 Sekunden drücken
Grüne LED blinkt

zugehörigen Sender betätigen
(z. B. Handsender)

Vorgang wird durch ein akustisches Signal bestätigt

Rechte Taste kurz drücken, um das Programm zu verlassen

¹bei Bedarf können Sie Sender auch als **Abstell-Sender** einlernen. Gehen Sie dazu vor wie oben beschrieben, benutzen aber die **linke** Taste zum Einlernen. Die **orange/rote** LED blinkt. Zum Verlassen des Programms drücken sie kurz die **linke** Taste.

Bild 4: Signalart einstellen

Betriebsanzeige LED leuchtet:

- Blitzleuchte und Signalgeber (Intervall wie bei "nur Signalgeber") **Grün**
- nur Signalgeber = 1 Minute Intervall, dann jede Minute 1x kurz **Orange/Rot**
- nur Blitzleuchte **Rot**

Durch mehrmaliges Drücken auf die rechte Taste können Sie eine der **drei** Alarmvarianten bestimmen.

Bild 5: Abstellen eines Rufes

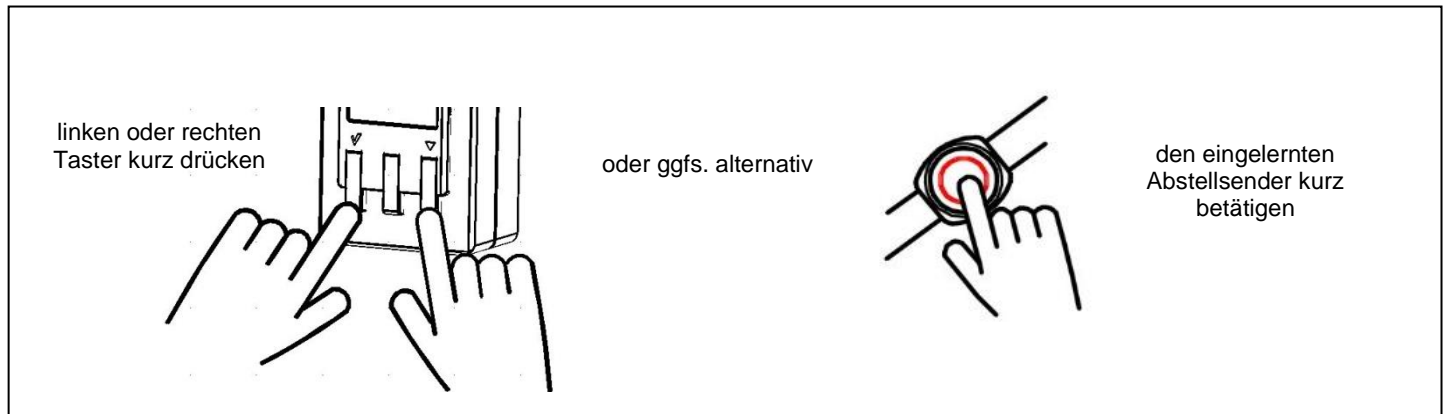


Bild 6: Alle eingelernten Sender löschen und die Einstellungen zurücksetzen auf Werkseinstellung


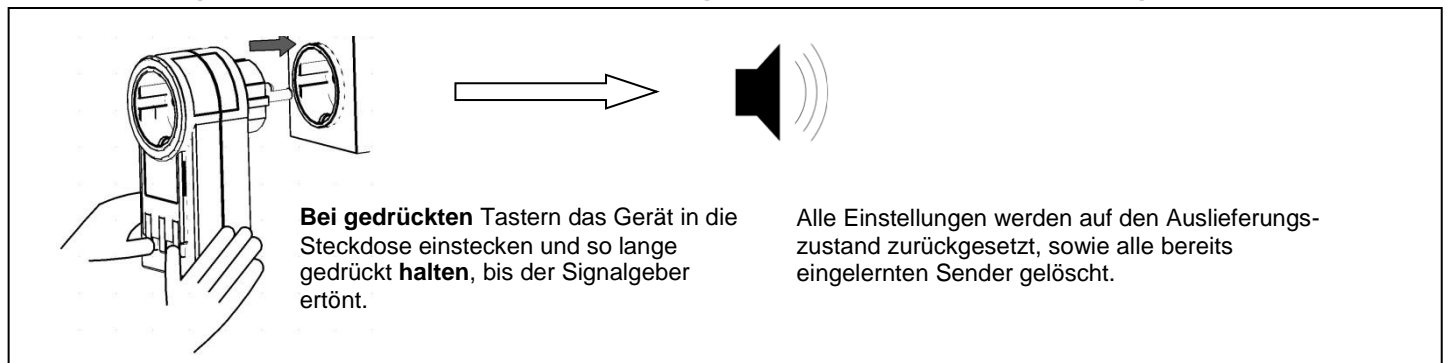


Bild 7: AUS/EIN-schalten und der Betriebsanzeige

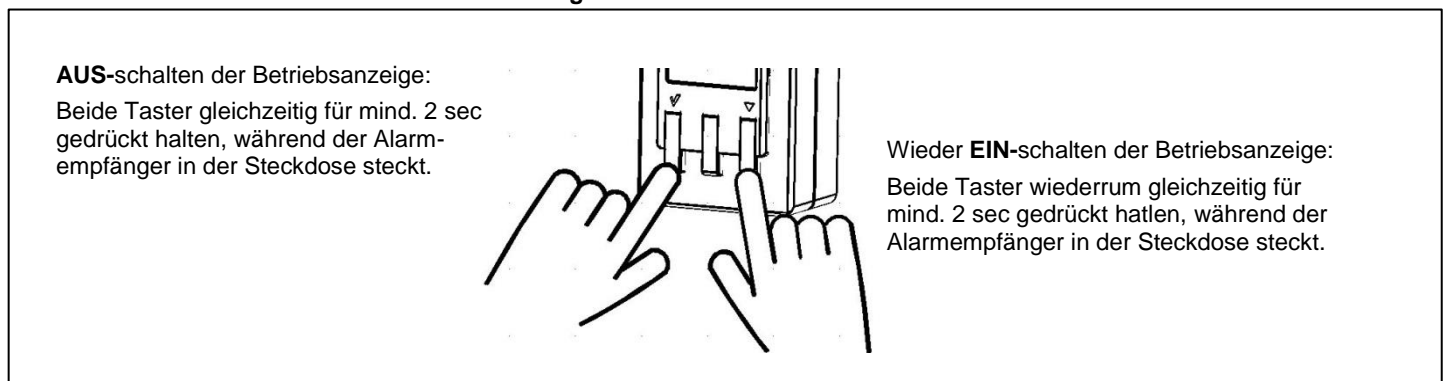

Ausschalten der Betriebsanzeige

Wenn (z.B. nachts) das Licht der Betriebsanzeige stört, können Sie durch jeweils ca. 2 Sekunden langes Drücken beider Taster die grüne LED Betriebs-Anzeige wechselseitig AUS- oder EIN-schalten.

Störungsanzeigen

Im Falle einer Systemstörung **blinkt** die Betriebsanzeige LED in **rot-grüner** Folge und der Summer piept alle 4 min kurz. Der Funk-Blitzalarm-T ist in diesem Fall nicht mehr zu nutzen und Ihr Lieferant der ruftechnischen Ausrüstung zu kontaktieren.

Handelt es sich um eine Frequenzbandbelegung durch ein fremdes Funksignal, **blinkt** die Betriebsanzeige LED **rot**.

Bei einer „Batterie schwach“ Meldung eines eingelernten Senders blinkt die LED **orange**.

Die Abstellung der Meldungen erfolgt durch drücken einer beliebigen Taste.

Gewährleistung


Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen. Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Gewährleistung erlischt bei Fremdeingriff oder unsachgemäßer Behandlung. Sie gilt nicht für den Verschleiß.

Serviceadresse

Wenden Sie sich dazu an den Lieferanten Ihrer ruftechnischen Ausrüstung.

Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte und Verpackungsmaterial gemäß den geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften.

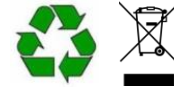

Konformität und gesetzliche Regelungen

Hiermit erklärt Lehmann Electronic, dass sich das Produkt soweit zutreffend in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV RL 2014/30/EU, der RED RL 2014/53/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHS RL 2011/65/EU befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen finden Sie im Internet unter www.lehmannweb.de.



REACH Verordnung Im Sinne der Verordnung sind wir nachgeschalteter Anwender. Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Informationen sind auf der Homepage einsehbar.