

Produktänderung Lifeline Vi seit März 2023

Betroffene Geräte: 57008/620, 57008/621, 57008/622, 57008/623, 57008/624, 57108/620

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie hiermit über eine Produktänderung informieren. Die Lifeline Vi Geräte (alle Modelle) haben seit März 2023 folgende Änderungen erfahren:


- *Der AUX-Anschluss ist mit einem Blindstopfen ausgestattet.*
- *Bei dem Notstromakku handelt es sich um einen NiMH-Akku.*
- *Das Steckernetzteil ist ein 12-V-Steckernetzteil.*

Die Details entnehmen Sie den folgenden Ausführungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr TUNSTALL Team

Blindstopfen am AUX-Anschluss

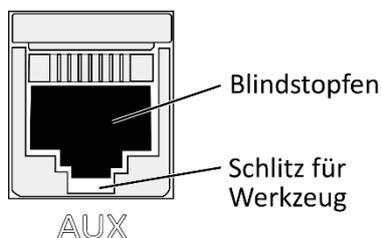

Der AUX-Anschluss aller Lifeline Vi Modelle ist seit Produktion März 2023 mit einem Blindstopfen ausgestattet. Der Blindstopfen dient als Berührungsschutz vor Kontakt mit elektrischem Strom.

Der Blindstopfen darf nur von technisch versierten Personen entfernt werden. Entfernen Sie den Blindstopfen nur, wenn Sie ein Gerät anschließen müssen, z. B. ein Keypad oder eine USB-Tapit für die Programmierung. Stecken Sie den Blindstopfen wieder ein, wenn Sie das Gerät wieder vom AUX-Anschluss getrennt haben.



VORSICHT! Vor dem Entfernen bzw. dem Wiedereinstecken des Blindstopfens müssen Sie das Lifeline ausschalten, indem Sie das Steckernetzteil und das Telefonanschlusskabel abziehen!

Zum Entfernen des Blindstopfens stecken Sie ein Werkzeug in den Schlitz (siehe Abbildung) und hebeln den Stopfen vorsichtig heraus.

Steckernetzteil und Notstromakku

Von Produktion November 2019 bis Februar 2023 waren alle Lifeline Vi Modelle mit einem Li-Ionen-Akku ausgestattet und wurden über ein 5-V-Steckernetzteil betrieben. Ab Produktion März 2023 wird nun auf den Akku (NiMH-Akku) und das Steckernetzteil (12-V-Steckernetzteil) umgestellt, die bereits bis zum Oktober 2019 verwendet wurden.

ACHTUNG! Jedes Hausnotrufgerät funktioniert nur mit einem Akkutyp und einem Steckernetzteiltyp. Wenn Sie ein Hausnotrufgerät mit einem falschen Akku oder einem falschen Netzteil betreiben, kann das Hausnotrufgerät beschädigt werden.

Welches Steckernetzteil mit einem Lifeline Vi Gerät benutzt werden muss, entnehmen Sie dem Typenschild auf der Unterseite des Gerätes. Welcher Akku dazugehört, entnehmen Sie der folgenden Übersicht.

Produktion bis Okt. 2019
Produktion ab März 2023

Hinweis auf dem Typenschild:
 „Steckernetzgerät XD5706004A“

Steckernetzteil 12 V
 Type: DSA-12PFT-12 FEU 120100
 Ersatzteil Best.-Nr.: XD5706004A



Ni-MH-Akkublock
 7,2 V; 1200 mAh
 Ersatzakku Bestell-Nr.: D3706005



Produktion Nov. 2019 bis Feb. 2023

Hinweis auf dem Typenschild:
 „Steckernetzgerät XD5706070A“

Steckernetzteil 5 V
 Type: DSA-6PFG-05 FEU 050100
 Ersatzteil Best.-Nr.: XD5706070A



Li-Ionen-Akku
 3,7 V; 2600 mAh
 Ersatzakku Bestell-Nr.: D3706010A

